





Anziehanleitung



Air Soft – Dorsal Handorthese



- ◆ Legen Sie die Handschiene auf die Dorsalseite der Hand bzw. des Unterarms und beurteilen Sie die Handgelenkstellung. Die Handgelenkstellung ist auf eine Extension von 20 vorgeformt. Bei Bedarf kann die Handgelenkstellung durch kräftiges Biegen mit einer gepolsterten Zange geändert werden.
- ◆ Zur Anpassung der Handflächenstange befestigen Sie diese mit dem Klettverschluss auf der Radiusseite der Handschiene. Die Passform können Sie durch Justierung des Klettbandes mit der Schiebeschnalle auf der Ulnarseite der Handschiene ändern. Überstehende Bänder abschneiden.
- ◆ Zur Anpassung des Handgelenk- und Unterarmbandes, das Klettband über die Volarseite des Unterarms führen und am Klettverschluss der Handgelenkschiene befestigen.

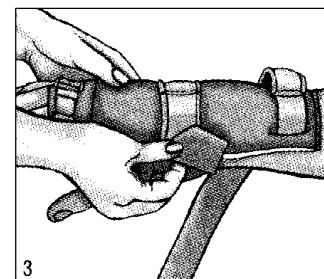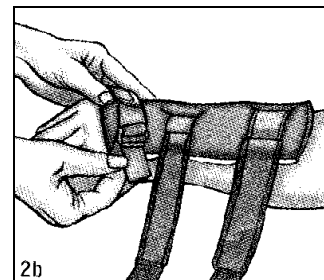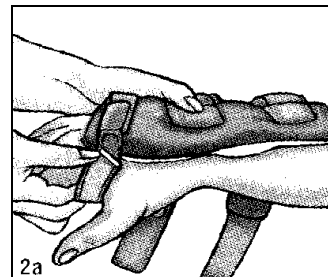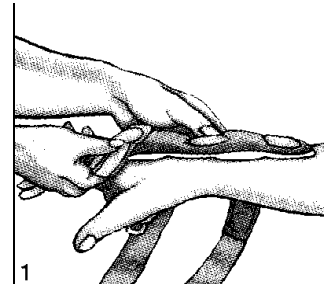

- ◆ Die Air Soft – Dorsal Handorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.
- ◆ Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de