

# Anziehanleitung



## Air Soft – Lagerung Handorthese



- ◆ Legen Sie die Schiene auf der volaren Seite der Hand an. Bestimmen Sie die korrekte Daumen – und Handgelenkstellung.
- ◆ Nehmen Sie die Schiene ab und passen Sie diese der gewünschten Stellung an.
- ◆ Schließen Sie die gepolsterten Gurte über Finger, Handgelenk und Unterarm. Schneiden Sie die überstehenden Gurtenden ab.



- ◆ Die Orthese kann bei 30°C Handwäsche gewaschen werden. **Nicht im Trockner trocknen.**
- ◆ **Die Air Soft Lagerung ist nicht zum Wiedereinsatz bestimmt.**
- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)