







Anziehanleitung



Air-Soft – Volar Handorthese



- ♦ Zum Einstellen der Handgelenkposition, die Schiene auf der volaren Fläche der Hand bzw. des Unterarms platzieren und den Sitz der Handgelenkposition bestimmen. Die Aluminiumstrebe so biegen, dass sie der gewünschten Handgelenkposition entspricht. (1a, 1b)
- ♦ Den mittleren Gurt zum Anpassen über den Handgelenkrücken auf den harten Klettverschlussteil auf der volaren Fläche der Stütze legen und dort befestigen. Der Gurt sollte am distalen Ende des Klettverschlusses positioniert werden. (2)
- ♦ Den distalen Gurt zum Anpassen quer über den mittleren Gurt legen. Den Gurt am harten Teil des Klettverschlusses auf der volaren Fläche der Schiene proximal zum mittleren Gurt befestigen. (3a, 3b)
- ♦ Den proximalen Gurt zum Anpassen über den Unterarm führen und ihn dann an dem harten Klettverschluss auf der volaren Fläche der Schiene befestigen. (4)
- ♦ Überstehende Gurte können gekürzt werden.
- ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**

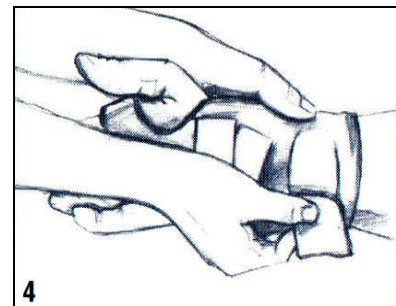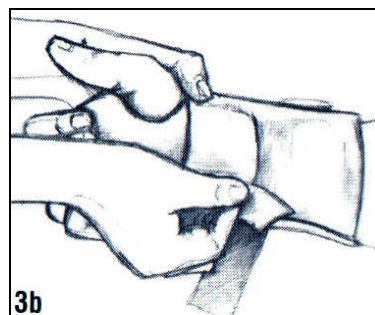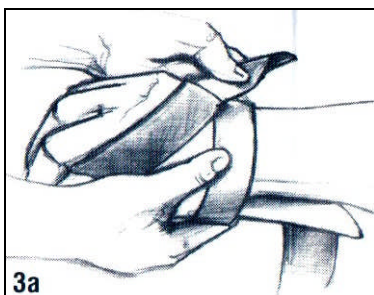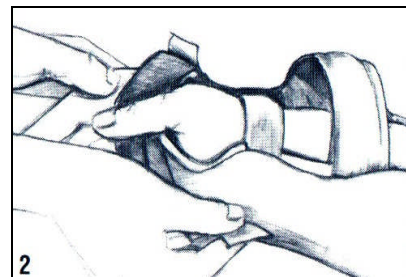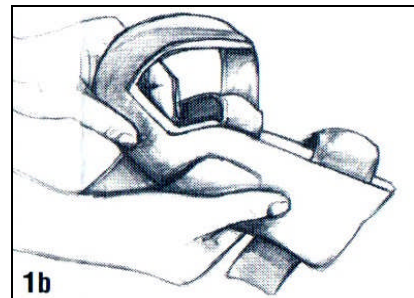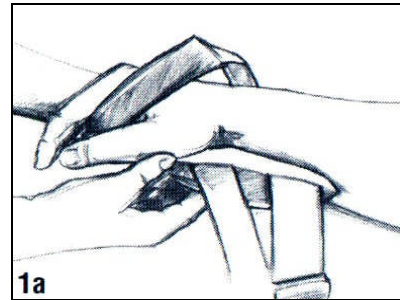

- ♦ **Die Air Soft Volar ist nicht zum Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de