

Anziehanleitung



BARNIE Kid Lagerungsorthese



- ◆ Beugen Sie das Knie des Kindes leicht an und legen Sie den Fuß so weit wie möglich in die Orthese. Drücken Sie mit der Handfläche den Fuß über dem Sprunggelenk leicht in die Orthese. Die Ferse darf jedoch an der dorsalen Schiene nicht anliegen.
- ◆ Schließen Sie nun das textile Fußteil über dem Fußrücken und schließen Sie die Klettverschlüsse über die Umlenker.
- ◆ Schließen Sie dann das Band über dem Sprunggelenk.
- ◆ Schließen Sie nun den Velcroverschluss über dem Unterschenkel.
- ◆ Kontrollieren Sie die Fußstellung. Der Fuß sollte flächig aufliegen und die Ferse nicht an der dorsalen Schiene anliegen.
- ◆ Die Zehenextension bzw. der Zehenschutz soll entsprechend der Fußlänge eingestellt werden.
- ◆ Der Ausleger an der Unterschenkelschiene kann nach links oder rechts ausgeklappt werden, um eine ungewünschte Rotation des Beines zu verhindern.

Redressionseinstellung

Drehen Sie an beiden Seiten die Schrauben gleichzeitig im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Winkel zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Die Gradzahlen können am Gewinde abgelesen werden.

Inversions- Eversionszügel

Um die Inversion oder Eversion zu beeinflussen wird der beigelegte Zügel in Höhe der Ferse über die Kydexschiene gelegt, unter den Redressionsstäben durchgeführt und seitlich mit der Öse und dem Klettverschluss verschlossen. Je nach gewünschter Korrektur wird der Zügel rechts oder links geschlossen und somit der Zug in die In- oder Eversion ausgeführt.

Zusatzpolster

Das beigelegte Zusatzpolster kann über dem Fußrücken im Sinne einer Zunge verwendet werden oder aber als Innenpolster im Fersenbereich, wenn eine Freilegung der Ferse nicht erwünscht oder erforderlich ist.

Der Bezug kann abgenommen werden und bei 30°C Schonwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden. Bitte nicht in den Trockner geben.

- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Die Barnie Kid Lagerungsorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de