

Anziehanleitung



Beach Boy Gipsschuh



- ◆ Nehmen Sie den Beach Boy Gipsschuh aus der Verpackung und öffnen Sie die Klettverschlüsse.
- ◆ Stellen Sie nun den Fuß bzw. Gipsfuß auf die Laufsohle, so dass er ganz auf der Sohle aufliegt.
- ◆ Schließen Sie nun den Klettverschluss über der Fessel, danach den Klettverschluss, der über den Fußrücken verläuft.
- ◆ Der Gipsschuh sollte so fest über dem Gips befestigt sein, dass er nicht verrutscht.

- ◆ **Der Beach Boy Gipsschuh ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de