

# Anziehanleitung



## Briefträger Armabduktionskissen

- ◆ Legen Sie das Kissen so unter dem Arm an, dass die halbrunde Körperausparung am seitlichen Rumpf anliegt. Je nach Lage kann der Abduktionswinkel größer oder kleiner gewählt werden (30° oder 45°)
- ◆ Befestigen Sie nun den Beckengurt auf der hinteren Seite des Kissens, führen ihn um die Taille nach vorne und kletten Sie das Ende vorne unten auf das Kissen. **(Bild 1)**



Bild1

- ◆ Nehmen Sie den 2. Gurt und befestigen ihn auf der hinteren Seite des Kissens. Führen Sie den Gurt über die gegenüberliegende Schulter nach vorne und kletten das Ende vorne auf das Kissen. **(Bild 2)**

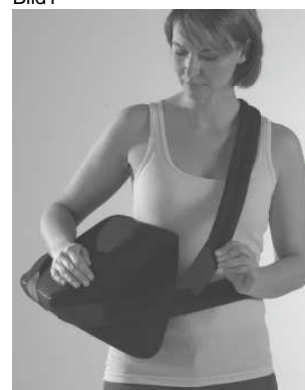


Bild2

- ◆ Fixieren Sie den Oberarm oder den Unterarm mit dem langen und das Handgelenk mit dem kurzen der verbleibenden Bänder.
- ◆ Das Stück mit dem langen Hakenband wird so auf dem Kissen befestigt, dass das freie Ende nach hinten bzw. zur Seite zeigt. Legen Sie das freie Ende so um den Arm bzw. Handgelenk, dass der Arm in der Schlaufe fixiert ist. **(Bild 3)**

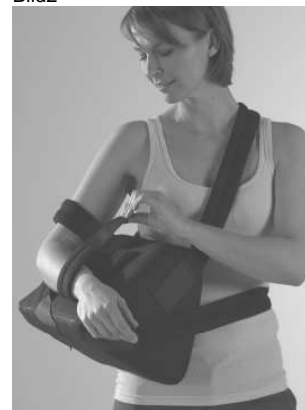


Bild3

- ◆ **Der Bezug des Briefträger Armabduktionskissens kann abgenommen werden und zusammen mit den Bändern bei 30°C Schonwaschgang gewaschen werden. Schließen Sie vorher alle Klettbänder.**
- ◆ **Das Briefträger Armabduktionskissen ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**
- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ Materialzusammensetzung: 50% elastisches Polyurethan, 25% Baumwolle, 25% Polyamid

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)