

Anziehanleitung



Comfort Handgelenkbandage



- ◆ Nehmen Sie die Bandage aus der Verpackung und öffnen Sie die Klettverschlüsse.
- ◆ Schieben Sie nun die Bandage so über die Hand, dass die Seite mit der Aluminiumschiene auf der Handinnenseite liegt, die Klettverschlüsse auf der Handrückenseite.
- ◆ Der Daumen sollte in der vorgesehenen Aussparung liegen.
- ◆ Schließen Sie nun die Klettverschlüsse am Daumen, über dem Handrücken und dem Unterarm.
- ◆ Die Bandage sollte fest sitzen, so dass das Handgelenk und die Fingergrundgelenke ruhiggestellt sind. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu Druckstellen kommt.
- ◆ **Die Bandage kann mit 30°C Handwäsche gewaschen werden.**
- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Bei auftretenden Druckstellen oder vermehrten Schmerzen suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädie-Techniker auf.**
- ◆ **Die Comfort Handgelenkbandage ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de