

Anziehanleitung



Dorsolign und Dorsolign K Stützmiuder

Für den Orthopädie-Techniker:

- ♦ Ermitteln Sie die richtige Größe durch Messen des Taillenumfangs.
- ♦ Wählen Sie nun zwischen den beiliegenden Stäben und Spiralen die notwendigen aus und schieben Sie diese in die vorgesehenen Besatzstreifen von oben ein.

Für den Patienten:

- ♦ Lösen Sie die vorderen Klettbänder und öffnen Sie den Reißverschluss.
- ♦ Legen Sie das LWS-Stützmiuder so um den Rumpf, dass der Reißverschluss vorne in der Mitte geschlossen werden kann.
- ♦ Die Rückenvergurtung sollte hierbei völlig entspannt sein. (**Bild 1**)
- ♦ Das Miuder sollte immer auf der Unterwäsche getragen werden.
- ♦ Schließen Sie nun den Reißverschluss und achten Sie darauf, dass der obere Rand des Mieders kurz unterhalb der Brustbeinspitze endet.
- ♦ Das Miuder soll so anliegen, dass die Lendenwirbelsäule gut eingeschlossen wird.
- ♦ Nehmen Sie nun die beiden Bänder mit den Klettverschlüssen jeweils in die rechte und linke Hand, führen den Daumen in die dafür vorgesehen Schlaufen (**Bild 2**) und ziehen Sie mit gleichmäßiger Kraft die beiden Bänder nach vorne und befestigen Sie diese auf der unteren Hälfte des Flauschbandes.
- ♦ Die Bänder sollten so weit nach vorne befestigt werden, dass eine deutliche Stabilisierung im Bereich der Lendenwirbelsäule spürbar ist, jedoch darf die Atmung nicht beeinträchtigt werden. (**Bild 3**)
- ♦ Bei auftretenden Druckstellen oder vermehrten Schmerzen suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädie-Techniker auf.
- ♦ **Hinweis:** Zur Aufrichtung der Wirbelsäule im Brustwirbelsäulenbereich kann optional ein Geradehalter mit dem Dorsolign Stützmiuder kombiniert werden.



Bild 1

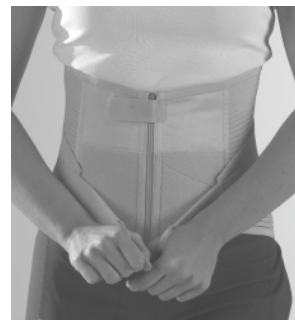


Bild 2



Bild 3

♦ Waschanleitung

Vor dem Waschen schließen Sie bitte alle Klettverschlüsse. 30°C Handwäsche. Nicht schleudern und nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln.

- ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ♦ **Das Dorsolign Stützmiuder ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de