

Anziehanleitung



Dylo Dynamische Lagerungsorthese



- ◆ Bringen Sie den Fuß in eine 90° Stellung. Zur Erleichterung flektieren Sie hierfür das Knie.
- ◆ Legen Sie den Fuß soweit wie möglich in die Orthese.
- ◆ Versuchen Sie, die Plantarflexion des Fußes zu vermeiden.
- ◆ Schließen Sie nun den Gurt, der über den Fußrücken verläuft und kontrollieren Sie, ob das Polster richtig sitzt. Ist dies nicht der Fall, öffnen Sie noch einmal den Gurt und kletten das Polster an der richtigen Stelle ein.
- ◆ Genau dasselbe machen Sie nun mit dem oberen Verschluss über das Schienbein.
- ◆ Kontrollieren Sie nun ob der Fuß richtig in der Orthese liegt. Das schwarze Innenpolster sollte an den Kanten immer etwas überstehen, damit kein Druck an den Kanten entsteht.
- ◆ Über die seitlichen Züge können Sie jetzt die Winkelstellung im Fußgelenk entsprechend den Erfordernissen einstellen bzw. beeinflussen.
- ◆ Falls es notwendig ist, die Zehen bzw. den Vorfuß in der Lagerungsorthese zu fixieren, kann der beigelegte Gurt an einer gewünschten Stelle des Vorfußes zirkulär um Fuß und Orthese fixiert werden.

Sollten während der Behandlung dennoch Druckstellen oder Schmerzen hervorgerufen werden, sollte der Arzt oder Orthopädietechniker gefragt werden.

Waschanleitung:

Das Innenpolster kann mit Handwäsche bei 30°C gewaschen, die Kunststoffschale mit einer warmen Seifenlauge abgewaschen werden.

- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Die Dylo Lagerungsorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de