

Anziehanleitung



Dynamische Schulterbandage



- ♦ Öffnen Sie den Klettverschluss und entfernen Sie die beiden Bänder.
- ♦ Ziehen Sie die Bandage über den Arm der betroffenen Seite. Eventuell kann eine Hilfsperson die Bandage von unten nachschieben.
- ♦ Nachdem Sie die Bandage richtig positioniert haben, schließen Sie den Klettverschluss oberhalb der Brust.
- ♦ Je nach gewünschter Stabilität und Bewegungseinschränkung können Sie einen oder beide elastische Stabilisierungsbänder einsetzen.
- ♦ Das Band mit dem Klettverschluss in der Mitte kletten Sie mit diesem auf die Verstärkung im Oberarmbereich. Befestigen Sie die beiden Bandenden auf dem vorderen bzw. hinteren Flauschband. Je nach Positionierung und Zugstärke des Bandes, können Sie hierbei auf die Bewegungslimitierung der Schulter einwirken.
- ♦ Das zweite Band befestigen Sie auf dem hinteren Flauschband, führen es über die Schulter nach vorne und fixieren es auf dem vorderen Flauschband.
- ♦ Die Bandage kann bei 30°C Schonwäsche gewaschen werden.
Bitte nicht im Trockner trocknen.
- ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ♦ **Die Dynamische Schulterbandage ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**



LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de