

Anziehanleitung



Easy Walk Peroneusorthese



Für den Orthopädietechniker:

- ♦ Ziehen Sie das Wadenpolster über die Wadenspange und schließen Sie den Klettverschluss.

- ♦ Zum genauen Einpassen der Easy Walk in den Schuh kann die Orthesensohle beschliffen bzw. beschnitten werden. Sollte die Breite der Sohlenplatte angepasst werden, schleifen Sie zuerst an der Außenseite. Falls eine umfangreiche Korrektur der Sohlenplattenbreite erforderlich ist, beschleifen Sie die Sohlenplatte von beiden Seiten. Bis zur Begrenzungslinie können Sie die Sohlenplatte auch mit der Schere bearbeiten, (**Bild**) hinter der Begrenzungslinie dürfen Sie nur noch schleifen. Bei Korrektur der Länge der Sohlenplatte beachten Sie bitte, dass der Verbindungssteg zur Wade nicht zu nahe an den medialen Fußknöchel kommt. Bei einer Längenanpassung verschiebt sich durch Kürzen der Sohlenplatte an der Ferse der Verbindungssteg nach hinten und eine Berührung mit dem Innenknöchel wird vermieden.



- ♦ Zur besseren individuellen Anpassung können Fußstützelemente auf die Oberfläche der Sohlenplatte geklebt werden (Supinationskeile, Pelotten usw.). Die Oberfläche der Orthese darf hierfür nicht aufgeraut werden.
- ♦ Es wird empfohlen, die Oberfläche der Sohlenplatte oder der darauf aufgebauten Fußstützen mit dem mitgelieferten oder einem eigenen Bezugsmaterial zu beziehen.
- ♦ Nach einer Korrektur sind die Kanten zu entschärfen und zu glätten.
- ♦ Die Absatzeinstellung des Schuhs muss mit der Einstellung der Orthese übereinstimmen.
- ♦ Die Sohlenplatte oder andere Konstruktionsteile der Orthese dürfen nicht gebohrt oder perforiert werden, da Löcher die Faserstruktur des Carbons beeinträchtigen können.
- ♦ Die Orthese ist in Prepreg Technologie gefertigt und kann nicht thermoplastisch verformt werden.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de

Anziehanleitung



Easy Walk Peroneusorthese



Für den Patienten:

- ♦ Die Orthese muss immer mit Socken und in Schuhen getragen werden. Benutzen Sie nur solche Schuhe, für die diese Orthese vom Orthopädietechniker angepasst wurde.

Befolgen Sie grundsätzlich die Hinweise des Orthopädietechnikers oder Arztes bezüglich Benutzung und Tragedauer der Orthese.

Die Orthese kann wie folgt angezogen werden:

1. Legen Sie die Orthese in den Schuh, ziehen den Schuh an und schließen diesen.
Zur Fixierung der Orthese schließen Sie das Klettband an der Wade.
 2. Sie können die Orthese als Hilfsmittel zum Anziehen des Schuhs benutzen:
Hierfür befestigen Sie die Orthese zuerst mit dem Klettband an der Wade. Anschließend steigen Sie mit dem Fuß und der Orthese zusammen in den Schuh.
- ♦ Der Fuß sollte täglich beobachtet werden. Bei Druckstellen oder Hautveränderungen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Orthopädietechniker.
 - ♦ Jegliche Veränderungen an der Orthese dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
 - ♦ Tägliche Fußhygiene ist erforderlich um einen optimalen Tragekomfort zu gewährleisten.
 - ♦ Durch das mitgelieferte Ersatzwadenpolster, welches bei 30°C Schonwäsche gereinigt werden kann, ist eine optimale Hygiene gewährleistet.



- ♦ Die Easy Walk Peroneusorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de