

Anziehanleitung



Fixationskniechiene



Fixationskniechiene gerade 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm

Fixationskniechiene gebeugt 20° 50 cm, 60 cm

Fixationskniechiene gerade extra weit 50 cm, 60 cm

- ♦ Ermitteln Sie den Beinumfang Ihres Patienten und korrigieren Sie den Sitz der seitlichen Teile der Fixationskniechiene entsprechend dem Beinumfang. Kletten Sie die Seitenteile so ein, dass alle 3 Teile zusammen dem Beinumfang Ihres Patienten entsprechen.
- ♦ Legen Sie die Chiene zuerst an der dorsalen Seite des Beines am Patienten an und legen Sie die beiden seitlichen Teile nach vorne, so dass sie auf der ventralen Seite aneinander stoßen oder leicht überlappen.
- ♦ Die Kniescheibe sollte in der dafür vorgesehenen Aussparung liegen.
- ♦ Verschließen Sie nun die Klettverschlüsse so, dass die Chiene fest sitzt aber für den Patienten noch angenehm ist.



Patienten sollten die Chiene nur nach Anweisung des Arztes oder des Orthopädietechnikers anlegen.

- ♦ Bei auftretenden Druckstellen oder vermehrten Schmerzen suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädie-Techniker auf.

Die Chiene kann bei 30°C mit Handwäsche und einer leichten Seifenlauge gereinigt werden.

- ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**

Materialzusammensetzung: 45% Nylon / 35% PU Schaum / 20% Baumwolle

- ♦ **Die Fixationskniechiene ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de