

Anziehenanleitung



Handbandage mit Schnürung



- ◆ Nehmen Sie die Bandage aus der Verpackung und öffnen Sie die Klettverschlüsse.
- ◆ Schlüpfen Sie mit der Hand unter dem Strickgewebe in die Bandage hinein.
- ◆ Die feste Metallschiene sollte auf der Handinnenseite anliegen.



- ◆ Nehmen Sie nun den breiten Klettverschluss, der am Ende der Schnürung angebracht ist und ziehen Sie damit über die Innen- und Unterseite des Handgelenks die Bandage fest. **Kürzen Sie den Klettverschluss mit einer Schere so, dass dieser nicht auf der Schnürung haften bleibt und diese ausfransen kann.**
- ◆ Schließen Sie nun den Klettverschluss um den Daumen und befestigen Sie ihn ebenfalls auf dem Flauschgewebe. Der Klettverschluss kann ebenfalls bei Bedarf gekürzt werden.
- ◆ Die Bandage sollte fest sitzen, so dass das Handgelenk und die Fingergrundgelenke ruhiggestellt sind, jedoch sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu Druckstellen kommt.
- ◆ Die Bandage kann bei 30°C Handwäsche gewaschen werden.

Waschanleitung: Vor dem Waschen bitte alle Klettverschlüsse schließen, so dass das Hakenklettband andere Materialien nicht beschädigen kann und eine optimale Haftung des Klettbands garantiert bleibt.

ACHTUNG: Die Klettverschlüsse bitte regelmäßig auf Sauberkeit kontrollieren.

- ◆ **Bitte nicht im Trockner trocknen.**
- ◆ **Bei auftretenden Druckstellen oder vermehrten Schmerzen suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädie-Techniker auf.**
- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Die Handbandage ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

Materialzusammensetzung: 50% PVC / 30% Polyester / 10% PP / 5% Nylon / 5% Baumwolle

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de