

Indikationen:

Die Kallassy Sprunggelenkbandage ist indiziert bei Außenbandverletzungen, als Alternative zum professionellen Taping. Sie kann auch bei medialen Bandinstabilitäten angewandt werden, indem man einfach die Seite vertauscht. Die Bandage kann sowohl bei akuten Verletzungen, als auch zur Prophylaxe getragen werden.

Eigenschaften und Merkmale:

- hoher Tragekomfort durch Verzicht auf harte Konstruktionselemente
- effektive und komfortable Stützung des Sprunggelenks
- funktionelle Plantar- und Dorsalflexion möglich
- Hemmung der Inversions- und Pronationsbewegung
- Unterstützung des Längsgewölbes
- Kompression und Wärmung des Sprunggelenks
- durch geringe Materialstärke fast in jedem Schuh zu tragen




① Lösen Sie alle Klettverschlüsse, bevor Sie die Bandage anlegen. Der Fuß muß rechtwinklig stehen. Versichern Sie sich, daß die Ferse so weit wie möglich nach hinten in die Bandage geschoben wird. Verschließen Sie nun den Reihenverschluß ①.



② Verschließen Sie den Fesserverschluß ②. Eventuell muß der Reihenverschluß ① nochmal nachgespannt werden, um Falten zu vermeiden.



③ Verschließen Sie die Fesselverankerung ③. Sie muß fest verschlossen, aber noch erträglich sein.

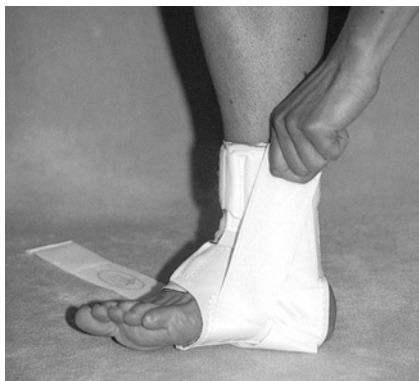

④ Pronieren Sie nun den Fuß (Heben Sie also die Fußaußenseite an, während die Innenseite noch den Boden berührt). In dieser Stellung müssen die lateralen Bänder ④ und ⑤ so fest wie möglich verschlossen werden.



⑤ Das mediale Band ⑥ wird nun straff nach oben und um die lateralen Bänder hintenherum nach innen auf den Fesserverschluß gelegt.

	rechts	links
XS		
35-39	02K001	02K002
S/M		
39-44	02K003	02K004
L/XL		
44-48	02K005	02K006
XXL		
48-	02K007	02K008

neaTec
Vertriebsgesellschaft
für orthopädische
Erzeugnisse mbH

Dieselstraße 6
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731/9 80 78 91
Fax 0731/9 80 72 69