

# Anziehanleitung



## Lerman Minerva Cervicalorthese



### Für den Orthopädie-Techniker:

- ◆ Nehmen Sie die Orthese aus der Verpackung.
- ◆ Stellen Sie nun die Kinnstütze auf die erforderliche Höhe, so dass der Kopf in Neutral-Nullstellung steht und sichern Sie die Kinnstütze mit Hilfe der Schrauben an der Vorderschale. Dasselbe machen Sie nun mit der Hinterkopfschale und befestigen diese mit Hilfe der Schrauben an der Rückenschale. Die Hinterkopfschale sollte entsprechend der Form über den unteren Hinterkopf und den Nacken reichen.
- ◆ Legen Sie nun die Vorder- und Rückenschale zentral vorne und hinten am Thorax auf, damit das Kinn und Hinterhaupt korrekt in den dafür vorgesehenen Schalen liegen. Verbinden Sie nun die beiden Schalen mit Hilfe der unteren Bänder und fixieren diese beidseits um den Brustkorb.
- ◆ Danach führen Sie die Schulterbänder über die Schultern, ziehen sie beidseits durch die vorgesehenen Schlaufen und kletten sie fest. **Beachten Sie bitte unbedingt, dass der Kopf-Nackensbereich immer in der zu fixierenden Stellung bleibt und kein einseitiger Zug entsteht.**
- ◆ Kontrollieren Sie jetzt noch einmal den korrekten Sitz. Danach verbinden Sie die Kinnschale mit Hilfe der Klettbinden beidseitig mit der Hinterkopfschale.
- ◆ Nehmen Sie nun das Kopfband, befestigen es an seitlich am oberen Rand der Hinterkopfschale auf dem vorgesehenen Klettband und führen es über die Stirn wieder zurück zur anderen Seite der Hinterkopfschale.
- ◆ **Bitte beachten Sie, dass der Sitz der Orthese in der Regel mit dem zu behandelten Arzt abgestimmt werden muss.**
- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Die Lerman Minerva Cervicalstütze ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**



LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)