



Anziehanleitung



Benutzerinformation für den Patienten beim Tragen eines 2-Schalen Korsetts aus dem MRS Rumpforthesensystem

Das MRS 2-Schalen Korsett sollte immer gemäß den Anweisungen des Arztes getragen werden.

- ◆ Klären Sie mit dem zuständigen Arzt ab, welche Bewegungen erlaubt und nicht erlaubt sind. Verhindern Sie Bewegungen und Haltungen, die die Stabilisierung der Wirbelsäule beeinträchtigen können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen des Arztes, Pflegepersonals und des Physiotherapeuten.
- ◆ Für den Komfort empfehlen wir Ihnen, ein enges T-Shirt oder Unterhemd aus Baumwolle unter dem Korsett zu tragen.
- ◆ Beachten Sie beim Anlegen des Korsetts die Anziehanleitung. Das Korsett muss gut und richtig sitzen, damit die gewünschte Wirkung zur Stabilisierung der Wirbelsäule erzielt wird.
- ◆ Keine Manipulation am Material Ihres 2-Schalen Korsetts vornehmen. Falls Änderungen am Korsett notwendig sind, suchen Sie bitte Ihren Orthopädiemechaniker auf.
- ◆ Das Korsett nicht abnehmen ohne Absprache mit dem Arzt.
- ◆ Große Hitzeeinwirkung auf das Korsett vermeiden
- ◆ Keine Lösungsmittel oder schmirgelartige Putzmittel zur Säuberung des Korsetts benutzen.

Benachrichtigen Sie Ihren Arzt oder Orthopädiemechaniker wenn

- ◆ das Korsett gesprungen oder gebrochen ist
- ◆ das Korsett reibt oder Reizungen, bzw. Wundprobleme der Haut entstehen
- ◆ das Korsett zu eng, weit oder zu schwer einzustellen ist
- ◆ Sie Schmerzen bekommen
- ◆ Die MRS Rumpforthese kann auch im Wasser getragen werden.
- ◆ **Das MRS 2-Schalen Korsett ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren