

# Anziehanleitung



## NeaGrip Handorthese



- ♦ Wählen Sie entsprechend den Fingerbeugekontrakturen des Patienten die benötigte Handrolle aus, oder beginnen Sie bei sehr starken Kontrakturen zuerst ohne Handrolle.
- ♦ Öffnen Sie sämtliche Verschlüsse.
- ♦ Wenn Sie eine Handrolle benutzen, schieben Sie diese über den Handteil der Orthese, indem Sie den Gurt durch die Rolle führen.
- ♦ Falls der direkte Kontakt der Finger zueinander nicht gewünscht wird, benutzen Sie den Fingerdistanzhalter indem Sie diesen auf die Handrolle aufkletten.
- ♦ Messen Sie die Handgelenkstellung- bzw. abweichung des Patienten aus und biegen Sie die Orthese dementsprechend vor. Wirken Sie hierbei nicht korrigierend auf die Handgelenkstellung ein.
- ♦ Legen Sie die Hand des Patienten auf die Orthese und überprüfen Sie den richtigen Sitz. Wenn nötig, formen Sie die Orthese noch etwas nach.
- ♦ Schließen Sie zuerst den Klettverschluss über dem Handgelenk, danach über dem Unterarm und überprüfen Sie den korrekten Sitz.
- ♦ Zuletzt schließen Sie den Klettverschluss über dem Handrücken.
- ♦ Beobachten Sie, ob die Fingerspitzen weiß werden. Sollte dieser Zustand länger als 15 Minuten anhalten müssen Sie die Handrolle etwas dünner schleifen oder auf die nächst kleinere zurückgreifen.
- ♦ Jeder Orthese liegen ein Ersatzbezug und ein Waschbeutel bei.



### Waschanleitung für die Bezüge:

Entfernen Sie die Überzüge von der Orthese, schließen Sie sämtliche Klettverschlüsse und legen Sie diese in den dafür vorgesehenen Waschbeutel.

Die NeaGrip Handorthese kann bei 30°C Schonwäsche gewaschen werden. **Bitte nicht im Trockner trocknen.**

### Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.

Materialzusammensetzung: 45% Polyester, 30% Stahl, 20% PE, 5% Nylon

**Die NeaGrip Handorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)