

Anziehanleitung



NeaKarot

- ◆ Führen Sie zuerst die Schlaufe der **NeaKarot** durch die Öffnung des roten Anziehhilfeschläuchchens und legen die Schlaufe über den Nippel.
- ◆ Drehen Sie nun das Schläuchchen um 180°.



Bild 1



Bild 2

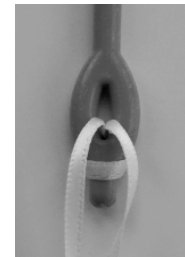


Bild 3

- ◆ Führen Sie nun das Schläuchchen von der Daumenseite her durch die Faust.
- ◆ Fassen Sie das Schläuchchen und ziehen es an der Kleinfingerseite aus der Hand heraus. Dabei schiebt sich die **NeaKarot** in die Hand.
- ◆ Anhand einer Scala von 1 – 12 können Sie nun die erforderliche Quengeldintensität ablesen.
- ◆ Bitte achten Sie darauf, dass sich die Fingerkuppen nicht durch einen zu hohen Druck weiß verfärben.
- ◆ Die NeaKarot kann in der Waschmaschine bei 40°C gewaschen werden.
- ◆ Durch eingearbeitete Silberfäden wirkt die NeaKarot bakteriostatisch was bedeutet, dass Bakterien sich auf dem Gewebe nicht vermehren können.
- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Die NeaKarot Orthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**



LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de