

Anziehanleitung



NeaSoft Handlagerungsorthese





Nehmen Sie die NeaSoft Handlagerungsorthese aus der Verpackung und öffnen Sie alle Verschlüsse.

Falls der direkte Kontakt der Finger zueinander nicht gewünscht wird, benutzen Sie den Fingerdistanzhalter indem Sie diesen über die palmare Seite der Orthese schieben. Das Gummiband sollte auf der Unterseite anliegen.



- ◆ Legen Sie Hand und Unterarm des Patienten auf die Lagerungsorthese.
- ◆ Überprüfen Sie das Handgelenk und kontrollieren Sie die eingestellte Dorsalextension der Orthese. Falls notwendig, biegen Sie die Orthese (z. B. über einer Stuhlkante) entsprechend den Anforderungen des Patienten nach.
- ◆ Prüfen Sie die Lage des Daumens und biegen Sie die Daumenauflage wenn nötig nach.
- ◆ Schließen Sie die Klettverschlüsse über dem Handgelenk und dem Unterarm, so dass sie richtig sitzen, jedoch nicht zu eng sind.
- ◆ Schließen Sie nun den Klettverschluss über dem Handrücken und Fingern zwischen den Fingergrund- und -mittelgelenken. Der Verschluss wird auf der Unterseite festgeklettet.
- ◆ Schließen Sie nun den Klettverschluss um den Daumen, so dass dieser sicher auf der Daumenauflage liegt.
- ◆ Wenn Sie den Fingerkamm benutzen, achten Sie darauf, dass die Fingertrennungen zwischen die Finger gelegt werden – **Finger nicht durch die Schlaufen schieben.**

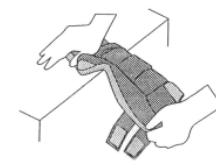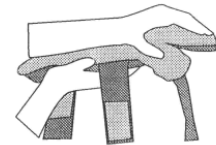

Waschanleitung für die Bezüge

Entfernen Sie die Überzüge von der Orthese, schließen Sie sämtliche Klettverschlüsse und legen Sie die Bezüge in den dafür vorgesehenen Waschbeutel.

Das Ganze kann nun mit Feinwaschmittel bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Benutzen Sie keinen Weichspüler und trocknen Sie die Überzüge **nicht im Trockner.**

- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
Materialzusammensetzung: 45% Polyester, 30% Stahl, 20% PE, 5% Nylon
- ◆ **Die NeaSoft Handlagerungsorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**
- ◆ **Vermeiden Sie den Kontakt mit offener Flamme, da sich das Material entzünden kann.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de