

Anziehanleitung



Neue Ulmer Hüftgelenkorthese



Diese Anziehanleitung ist lediglich eine allgemeine Anleitung und kann den individuellen Anforderungen des Patienten gemäß vom Orthopädietechniker abgewandelt werden.

Nehmen Sie folgende Maße am Patienten:

- ◆ Taillenumfang
- ◆ Beckenumfang
- ◆ Proximaler Oberschenkelumfang
- ◆ Distaler Oberschenkelumfang

Wählen Sie anhand der Maßtabelle die richtige Größe des Beckenmoduls und des Oberschenkelmoduls aus. Wählen Sie zwischen Standard-Gelenk und Anatomischem Gelenk.



Beachten Sie:

Da es sich um ein Modulsystem handelt, können Becken- und Oberschenkelmodul unterschiedliche Größen haben.

Die Befestigungsplatten für das Hüftgelenk sind beidseits am Beckenmodul angebracht, so dass das Beckenmodul universell für beide Seiten eingesetzt werden kann.

Durch die richtige Positionierung der Schrauben an der hinteren Einstellplatte des Beckenmoduls kann der Umfang und Sitz des Moduls individuell eingestellt werden.

Das Beckenmodul wird nun am Patienten so angelegt, dass der Tailleneinzug und die Befestigungsplatte für das Hüftgelenk in der optimalen Position sind. Verschließen Sie das Beckenmodul mit der Verschlusschnalle.

Fixieren Sie das Oberschenkelmodul mit den beiden Verschlüssen.

Das Hüftgelenk wird vorher in der gewünschten Flexions- Extensionsstellung und der kontrollierten Abduktionsstellung positioniert. Die Hüftgelenkachse sollte mit der anatomischen Achse soweit wie möglich übereinstimmen.

- ◆ **Zuletzt sollten alle Schrauben mit LockTite gesichert werden.**
- ◆ **Die Polsterteile sind auf Hautverträglichkeit getestet und können bei 30°C Handwäsche gewaschen werden.**
- ◆ **Die Neue Ulmer Hüftgelenkorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de