

# Anziehanleitung



## OSCAR Kid Lagerungsorthese



- ◆ Beugen Sie das Knie des Kindes leicht an und legen Sie den Fuß so weit wie möglich in die Orthese. Drücken Sie mit der Handfläche den Fuß über dem Sprunggelenk leicht in die Orthese. Die Ferse darf jedoch an der dorsalen Schiene nicht anliegen.
- ◆ Schließen Sie nun das textile Fußteil über dem Fußrücken und schließen Sie die Klettverschlüsse über die Umlenker.
- ◆ Schließen Sie dann das Band über dem Sprunggelenk.
- ◆ Schließen Sie nun den Velcroverschluss über dem Unterschenkel.
- ◆ Kontrollieren Sie die Fußstellung. Der Fuß sollte flächig aufliegen und die Ferse nicht an der dorsalen Schiene anliegen.
- ◆ Die Zehenextension bzw. der Zehenschutz soll entsprechend der Fußlänge eingestellt werden.
- ◆ Der Ausleger an der Unterschenkelschiene kann nach links oder rechts ausgeklappt werden, um eine ungewünschte Rotation des Beines zu verhindern.
- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Die Oscar Kid Lagerungsorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**



LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)