

Anziehanleitung



Oscar Plus Lagerungsorthese

Wechseln des Austauschfells



- ◆ Heben Sie die Laufsohle an, damit sich die Klettverschlüsse lösen.
- ◆ Drehen Sie nun die Laufsohle und schieben Sie die Schraubenöffnung in der Sohle über die Schraube. Die Laufsohle können Sie nun abheben.
- ◆ **Versuchen Sie nicht, die Schraube zu öffnen, diese ist festgeklebt und kann nicht geöffnet werden.**
- ◆ Öffnen Sie den Klettverschluss im Schienbeinbereich.
- ◆ Drehen Sie den Ausleger auf der hinteren Seite der Unterschenkelschiene zur Seite.
- ◆ Nun können Sie den oberen Teil des Austauschfells nach oben raus schieben. Das Gummiband muss dabei über die Schraube gezogen werden.
- ◆ Öffnen Sie nun die Klettverschlüsse des unteren Teils des Austauschfells.
- ◆ Lösen Sie den Klettverschluss im unteren Fersenbereich, das schwarze Klettverschlussstück sollte dabei auf der Schiene kleben bleiben.
- ◆ Nehmen Sie nun die beiliegende Kunststoffhilfe und schieben diese mit der flachen Seite von der Ferse her zwischen Schiene und Bezug. Die gebogene Seite dient als Haltegriff. Schieben Sie die Kunststoffhilfe so in Schraubenaussparung, dass die Spitze über der Schraube liegt. Nun können Sie den Bezug über Kunststoffhilfe und Schraube ziehen.
- ◆ Beim Beziehen der Schiene verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge

Waschanleitung:

Das Fellpolster kann mit Handwäsche bei 30°C gewaschen, die Kunststoffschale mit einer warmen Seifenlauge abgewaschen werden.

- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de