


Anziehanleitung




Pucci Air - aufblasbare Handorthesen




- ◆ Nehmen Sie die Orthese aus dem Beutel, und bezeichnen Sie den zusätzlichen Bezug mit dem Namen des Patienten.
- ◆ Verbinden Sie das schwarze oder dunkelblaue Ende der Pumpe mit dem Luftventil der Orthese. Drücken Sie auf den Ballon und pressen Sie gleichzeitig das Handteil zusammen, um eventuelle Luft aus dem Handteil der Orthese zu saugen. Trennen Sie nun die Pumpe von der Orthese.
- ◆ Untersuchen Sie, in welche Stellung das Handgelenk gebracht werden kann. Falls die Stellung des Handgelenkes anders ist als die der Orthese, sollten Sie das schmale Handgelenkteil bis zum gewünschten Winkel biegen. Am leichtesten geht dies über eine Stuhllehne oder Bettende (auf jeden Fall über etwas Rundes)
- ◆ Öffnen Sie vorsichtig die Hand und schieben sie das luftleere Handteil der Orthese möglichst weit unter die Finger, ohne dass es dem Patienten unangenehm wird. Das Luftventil muss auf der Kleinfingerseite der Hand sein. (**Bild 1**)
- ◆ Richten Sie vorsichtig den Daumen aus und legen Sie ihn in Oppositionsstellung auf das Handteil der Orthese. Am Anfang der Behandlung ist dies jedoch nicht immer möglich. (**Bild 2**)
- ◆ Bringen Sie die Armstütze der Orthese unter dem Arm an und befestigen Sie die Schlaufen um das Handgelenk und den Unterarm. Die Klettverschlüsse sollten so fest sein, dass sie die Orthese sicher am Platz halten, jedoch darf die Blutzirkulation nicht behindert werden. Die Armstütze muss individuell dem jeweiligen Patienten angepasst werden. (**Bild 3**)

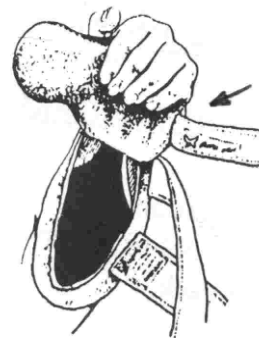

1.

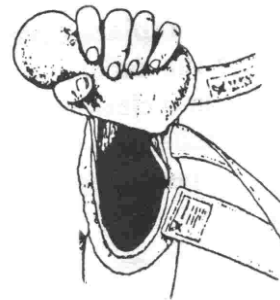

2.

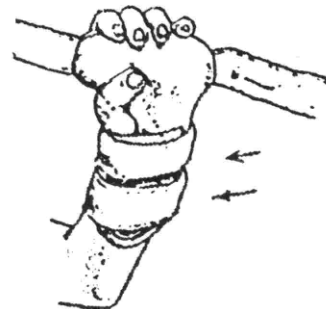

3.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de


Anziehanleitung




Pucci Air - aufblasbare Handorthesen



- ◆ Verbinden Sie das durchsichtige Ende der Pumpe mit dem Luftventil der Orthese. Drücken Sie vorsichtig auf die Pumpe, um das Handteil aufzublasen und mit einer sanften Strecktherapie der Hand anzufangen. (**Bild 4**)
- ◆ Nachdem die gewünschte Luftmenge eingeblasen worden ist, entfernen Sie die Pumpe von der Orthese.
- ◆ Befestigen Sie die Handschlaufe um die Finger oder den Handrücken. Es ist wichtig, dass die Orthese nicht verrutschen kann, darf aber nicht so fest sein, dass die Blutzirkulation behindert wird. (**Bild 5**)
- ◆ Kontrollieren Sie die Stellung der Finger. Die vier Finger müssen um das Handteil der Orthese liegen, der Daumen in Oppositionsstellung. Kein Finger darf zwischen der Handfläche und dem Handteil der Orthese eingeklemmt werden. Falls die Hand schwer kontrakt ist, wird es vielleicht am Anfang notwendig sein, den Daumen direkt neben den Fingern liegen zu lassen.
- ◆ Beobachten Sie, ob die Fingerspitzen weiß werden. Sollte dieser Zustand länger als 15 Minuten andauern, müssen Sie solange Luft aus der Orthese saugen, bis die Finger wieder ihre natürliche Hautfarbe angenommen haben. Notieren Sie die Luftmenge. Bestimmen Sie ein Intervall für das Strecken und Biegen der Finger. Anfänglich ca. 15 Minuten jedoch nie länger als 7 Stunden.

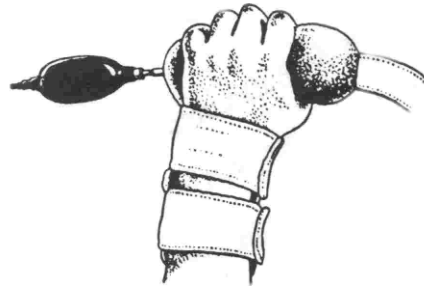

4.

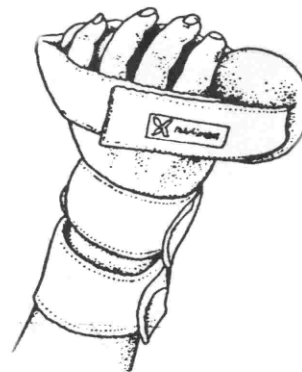

5.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de

Anziehanleitung



Pucci Air - aufblasbare Handorthesen



- ◆ Sollte der Patient heftige Schmerzen bekommen, lassen Sie soviel Luft ab bis die Schmerzen nachlassen. Wenn die Schmerzen nicht aufhören, nehmen Sie die Orthese ab. Versuchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt ein erneutes Anlegen, jedoch ist es immer wichtig, die Luft langsam einzublasen.
- ◆ Um die Orthese abzunehmen. lösen Sie nur die Schlaufen.
- ◆ Sollte es einmal nach der Behandlung zu Erröten oder heftigen Schmerzen kommen, nehmen Sie die Orthese ab und unterrichten Sie die zuständige Person.



- ◆ **Das Pucci Air Handorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**
- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**

Waschanleitung

- Nehmen Sie die Schienen und aufblasbaren Teile aus dem Bezug heraus.
- Schließen Sie alle Klettverschlüsse und legen Sie den Überzug in das beiliegende Waschsäckchen.
- Sie können nun den Überzug in der Waschmaschine im Waschprogramm Pflegeleicht 30°C Buntwäsche mitwaschen.
- Bitte benutzen Sie ein sanftes Waschmittel, benutzen Sie **keine Weichspüler**.
- Der Überzug sollte nur leicht geschleudert und an der Luft getrocknet werden.
- **Trocknen Sie den Überzug nicht im Trockner**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de