

Anziehanleitung



RepoCox Hüftorthese



- ◆ Fixieren Sie die Hüftorthese mit Hilfe des Klettverschlusses fest um die Taille. Der vertikale Oberschenkelteil der Hüftorthese sollte dabei über die Außenseite der betroffenen Hüfte und des Oberschenkels verlaufen.
- ◆ Klappen Sie nun das untere Teil nach oben und positionieren Sie die Hüftpelotte so, dass der obere Rand direkt unter dem Trochanter Major anliegt. (**Bild 1**)

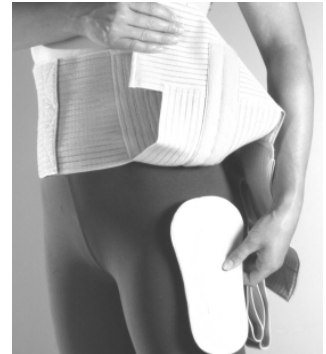


Bild 1

- ◆ Führen Sie nun das hochgeklappte Oberschenkelteil nach unten. Sie fixieren dadurch die Pelotte mit Hilfe des Klettverschlusses.
- ◆ Schließen Sie anschließend das quer verlaufende untere Teil der Hüftorthese fest um den Oberschenkel. (**Bild 2**)



Bild 2

- ◆ Nehmen Sie nun das beiliegende Elastikband und fixieren Sie den Kreuzungspunkt des Bandes in Höhe der Pelotte. Die beiden kurzen Schlaufenenden sollten hierbei jeweils im 45° Winkel nach vorne unten bzw. hinten unten zeigen. Das lange Schlaufenende zeigt somit nach vorne oben.
- ◆ Führen Sie die beiden auf der Innenseite des Oberschenkelteils angenähten Elastikbänder jeweils durch die entsprechenden nach unten zeigenden Metallschlaufen und fixieren diese.
- ◆ Nehmen Sie nun das nach hinten führende lange Elastikband, legen es von hinten in die gegenüber-liegende Taille und führen es durch die obere Metallschleufe. Fixieren Sie das Band so fest wie möglich. (**Bild 3**)



Bild 3

Waschanleitung:

Schließen Sie den Klettverschluss und waschen Sie den Geradehalter bei 30°C Handwäsche mit milder Seifenlauge. Bitte trocknen Sie den Geradehalter **nicht im Trockner** und verwenden Sie keine scharfen Wasch- oder Bleichmittel.

- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Die RepoCox Hüftorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de