

Anziehanleitung



Schulterentlastungsorthese

Aufblasbare Orthese zur Abduktion des Schultergelenks mit variabler Einstellungsmöglichkeit des Abduktionswinkels. Die Größe des Abduktionswinkels ist abhängig von der Füllmenge des Luftkissens.

Das aufblasbare Luftkissen ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen ungewollten Luftverlust verhindert.

- ♦ Ziehen Sie das Gurtsystem über die gegenüberliegende nicht betroffene Schulter, positionieren es und stellen die Gurte ein (ggf. kürzen Sie die Gurte mit einer Schere).
- ♦ Befestigen Sie nun den Luftsack an dem Gurtsystem. (**Bild 1**)
- ♦ Ziehen Sie die Bänder eventuell nochmals nach, damit die Orthese gut am Körper stabilisiert ist.
- ♦ Messen Sie die Unterarmlänge von Ellbogen bis Mittelhand aus.
- ♦ Stellen Sie auf diesen Messwert die Länge der Unterarmauflage ein. (**Bild 2**)
- ♦ Zur optimalen Positionierung des Armes legen Sie die Verpackungstüte zwischen Kissen und Unterarmschiene. (**Bild 3**)
- ♦ Fixieren Sie nun den Arm in der Unterarmschiene.
- ♦ Nach genauer Positionierung halten Sie den Arm fest, ziehen die Tüte langsam weg und drücken die Klettverschlüsse an.

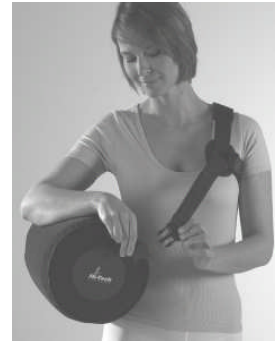


Bild 1

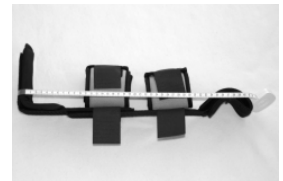


Bild 2



Bild 3

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de

Anziehanleitung



Schulterentlastungsorthese



- ◆ Kontrollieren Sie nochmals alle Klettbänder. (**Bild 4**)
- ◆ Befestigen Sie nun noch das Taillenband (**Bild 5**)
- ◆ Überprüfen Sie nochmals den korrekten Sitz der Orthese. (**Bild 6**)



Bild 4



Bild5

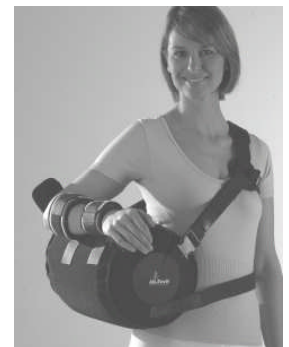


Bild6


- ◆ **Optional kann zu einer noch besseren Stabilisierung ein Oberarmkeil und ein 15cm breites Taillenband mit Klettfläche zur Kissenfixierung eingesetzt werden.**



15cm breites Taillenband



Oberarmkeil

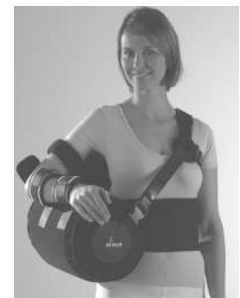

- ◆ **Die textilen Teile sind auf Hautverträglichkeit getestet und können bei 30°C Handwäsche gewaschen werden. Nicht im Trockner trocknen**
- ◆ **Die Schulterentlastungsorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de

Anziehenanleitung



Schulterentlastungsorthese



Informationen zur Verwendung des Armkeils und des Bauchgurts

Armkeil:

Häufig kann es bei Schulterverletzungen oder nach operativen Eingriffen an der Schulter notwendig sein, den Oberarm zusätzlich abzustützen, damit das Gewicht des Oberarms nicht auf dem Schultergelenk „lastet“. Dafür ist es empfehlenswert, den optional angebotenen Armkeil zu verwenden. Dieser wird im freiliegenden „Dreieck“ Oberarm-Rumpf-Orthese eingeschoben und so positioniert, dass der Oberarm auf dem Armkeil gut aufliegt.

Bauchgurt 15 cm breit

Zur besonderen Sicherung der Orthese im Rumpf-Taillenbereich, kann statt dem beigelegten schmalen Bauchgurt, ein zusätzlicher elastischer Bauchgurt von 15 cm Breite eingesetzt werden. Dieser bietet die Möglichkeit, durch eine klettende Funktion, die Orthese auf diesem Gurt fest zu fixieren. Ein Verrutschen der Orthese ist so nicht mehr möglich. Falls dies aufgrund von Indikation bzw. anatomische Gegebenheiten erforderlich sein sollte, empfehlen wir, den 15 cm breiten Bauchgurt einzusetzen.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de