

Anziehenanleitung



Solo Geradehalter



- ◆ Nehmen Sie die beiden Teile des Geradehalters und schauen Sie auf dem inneren Etikett nach der rechten Seite.
- ◆ Schlüpfen Sie nun mit dem rechten Arm durch die dafür vorgesehene Armschleufe. Der gepolsterte Baumwollschlauch sollte an der vorderen Seite des Achsel-Schulterbereichs aufliegen und gut sitzen.
- ◆ Das breite Stoffband sollte über den Rücken zur linken Seite verlaufen.
- ◆ Mit dem linken Teil des Geradehalters verfahren Sie genauso, nur schlüpfen Sie mit dem linken Arm in die Armschleufe.
- ◆ Fassen Sie nun mit beiden Händen nach hinten bzw. zur Seite und greifen Sie die Enden des jeweiligen von der gegenüberliegenden Schulter kommenden Teils.
- ◆ Die breiten konisch zulaufenden Stoffteile sollten sich nun über dem Rücken in Schulterblatthöhe überkreuzen.
- ◆ Schließen Sie nun beide Teile mit dem vertikal verlaufenden Klettverschluss unterhalb der Brust.
- ◆ Der Geradehalter sollte so fest angezogen werden, dass ein Zurückziehen der Schulter deutlich spürbar ist.



Hinweis: Bitte beachten Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Orthopädietechnikers auch hinsichtlich der Tragezeit. Falls Schmerzen oder Druckstellen auftreten, fragen Sie bitte bei einem der oben genannten Spezialisten nach.

Waschanleitung:

Schließen Sie den Klettverschluss und waschen Sie den Geradehalter bei 30°C Handwäsche mit milder Seifenlauge.

Bitte trocknen Sie den Geradehalter **nicht im Trockner** und verwenden Sie keine scharfen Wasch- oder Bleichmittel.

- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Der Solo Geradehalter ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de