



# Anziehanleitung



## Standard Schulterverband



- ◆ Nehmen Sie den Schulterverband aus der Verpackung und lösen Sie die beiden Teile des Schulterverbandes voneinander.
- ◆ Legen Sie Ihren Arm in die breite Armschlinge so, dass die beiden langen Bänder nach oben zeigen.
- ◆ Führen Sie beide Bänder über die jeweilige Schulter, überkreuzen Sie diese hinten über dem Rücken und führen die Bänder vorne unter der breiten Armschlinge durch.
- ◆ Kletten Sie die Bänder vorne auf der Armschlinge so fest, dass der Arm in der vom Arzt gewünschten Position liegt. Die Schultern sollten sich dabei auf der gleichen Höhe befinden und nicht hochgezogen sein. Arm und Schulter sollten schmerzfrei gelagert werden.
- ◆ Sollte eine stärkere Fixierung von Arm und Schulter erforderlich sein, nehmen Sie dazu das extra breite lange Band und befestigen es um Arm und Rumpf wie auf der Abbildung ersichtlich.
- ◆ **Hinweis:** Befolgen Sie auf jeden Fall die Anweisungen Ihres Arztes oder Orthopädietechnikers beim Anlegen des Standard Schulterverbandes hinsichtlich der erforderlichen Tragezeit.
- ◆ **Waschanleitung:**  
Schließen Sie die Klettbander und waschen sie den Schulterverband in einer milden Seifenlauge bei 30°C im Waschprogramm Pflegeleicht. Benutzen Sie keine scharfen Wasch- oder Bleichmittel, keine Weichspüler und trocknen Sie den Schulterverband **nicht im Trockner**.
- ◆ **Der Standard Schulterverband ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**
- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**

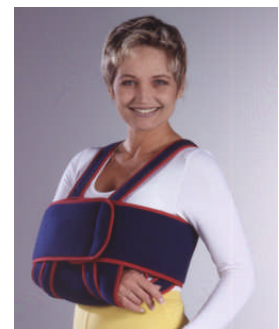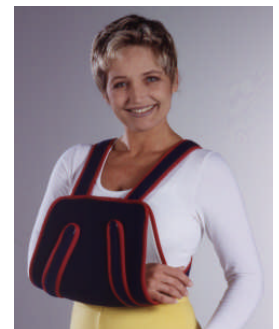

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)