


Anziehenanleitung



SymphoTec Symphysenbandage



- ◆ Nehmen Sie die Bandage aus der Verpackung.
- ◆ Legen Sie die gepolsterte Grundbandage um das Becken und verschließen Sie die Bandage vorne am Bauch unter leichtem Zug mit dem Klettverschluss. Die Bandage sollte zirkulär um das Becken, oberhalb der Trochanter major, in Höhe der kleinen Glutealmuskeln getragen werden.
- ◆ Korrigieren Sie gegebenenfalls den Sitz der SymphoTec Bandage.
- ◆ Führen Sie nun das unelastische Gurtband durch die Kunststoffschlaufe und ziehen Sie es fest an.
- ◆ Die Bandage sollte so fest wie möglich getragen werden.

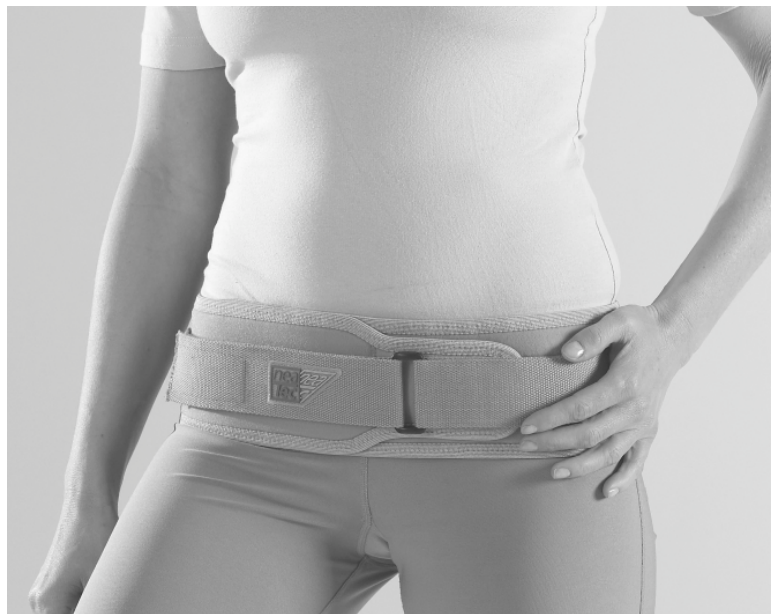

Waschanleitung:

Die Bandage kann 30°C Handwäsche gewaschen werden.
Nicht im Trockner trocknen.

- ◆ Die SymphoTec Bandage ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de