

Anziehanleitung



Taylor Reklinationsorthese



Patienteninformation

- ♦ Öffnen Sie die Klettverschlüsse der Schultergurte und des Leibteils.
- ♦ Gehen Sie mit den Armen durch die Schultergurte, so dass das Teil mit den langen Stäben am Rücken anliegt (ähnlich dem Anlegen eines Rucksackes).
- ♦ Schließen Sie das Leibteil vorne um das Becken. Das Leibteil sollte dabei nicht zu hoch sitzen.
- ♦ Nehmen Sie die beiden langen Schultergurte auf jeder Seite und spannen diese, bis die Orthese gut am Rumpf anliegt. Kletten Sie nun die Bänder rechts und links auf dem vorderen Leibteil fest.

Beachten Sie bitte die Hinweise, die Sie bei der Einweisung vom Orthopädietechniker bekommen haben.

Falls es Probleme mit der Handhabung der Orthese gibt oder Druckstellen auftreten sollten, kontaktieren Sie bitte das Sanitätshaus von dem Sie die Orthese erhalten haben.



Waschanleitung:

Ziehen Sie bitte die beiden langen Stäbe aus den Taschen im Rückenbereich heraus, schließen Sie alle Klettverschlüsse und waschen Sie die Taylor Reklinationsorthese bei 30°C Handwäsche bei.

Bitte nicht in den Trockner geben sondern an der Luft trocknen lassen.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de