

Anziehanleitung



Unilign Rückenbandage



Für den Orthopädie-Techniker:

- ♦ Ermitteln Sie die richtige Größe durch Messen des Taillenumfanges.
- ♦ Falls eine Pelotte ausgewählt wurde, positionieren Sie diese auf dem angenähten Velcroteil in der erforderlichen Höhe im Rückenbereich.



Für den Patienten:

- ♦ Lösen Sie die seitlichen Klettbänder und öffnen Sie die breitflächigen Klettverschlüsse der beiden vorderen Teile.
- ♦ Legen Sie das Unilign Stützieder um den Rumpf und schließen Sie mit Hilfe des Klettverschlusses das untere Teil fest um Ihren Rumpf. Falls eine Pelotte angebracht wurde, sollte der korrekte Sitz dieser nochmals überprüft werden.
- ♦ Schließen Sie nun das obere Teil des Stützieders ebenfalls mit Hilfe des vorhandenen Klettverschlusses.
- ♦ Das Mieder soll so anliegen, dass die Lendenwirbelsäule gut eingeschlossen wird.
- ♦ Nehmen Sie nun die beiden Seitenbänder mit den Klettverschlüssen jeweils in die rechte und linke Hand und ziehen Sie mit gleichmäßiger Kraft die beiden Bänder nach vorne und befestigen Sie diese auf dem unteren Teil des Uniligns.
- ♦ **Bei auftretenden Druckstellen oder vermehrten Schmerzen, suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädie-Techniker auf**
- ♦ **Waschanleitung**
Vor dem Waschen schließen Sie bitte alle Klettverschlüsse.
Kalt bei max. 40°C mit Neutralseife waschen
Nicht schleudern und nicht im Trockner trocknen
Die elastischen Partien nicht bügeln.
- ♦ **Das Unilign ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de