

# Anziehanleitung



## Unterschenkel – Fußorthese für Kinder



### Für den Orthopädietechniker

- ◆ Ermitteln Sie die richtige Größe durch messen der Fußlänge
- ◆ Die Orthese ist bei 180°- 190° C thermoplastisch verformbar.

### Für den Patienten

- ◆ Bringen Sie dem zu versorgenden Fuß in die Neutral-Null-Stellung (Fuß zu Unterschenkel 90°) und legen ihn in die Orthese.
  - ◆ Schließen Sie den Klettverschluss im Wadenbereich.
  - ◆ Überprüfen Sie am Anfang der Tragezeit stündlich den Fuß auf eventuelle Rötungen oder Druckstellen.
- 
- ◆ Die Unterschenkel- Fußorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)