

Anziehanleitung



NeaKarot

- ♦ Führen Sie zuerst die Schlaufe der **NeaKarot** durch die Öffnung des roten Anziehhilfeschläbchens und legen die Schlaufe über den Nippel.
- ♦ Drehen Sie nun das Stäbchen um 180°.



Bild 1



Bild 2

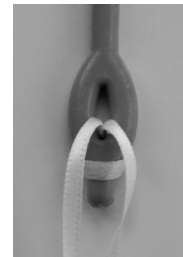


Bild 3

- ♦ Führen Sie nun das Stäbchen von der Daumenseite her durch die Faust.
- ♦ Fassen Sie das Stäbchen und ziehen es an der Kleinfingerseite aus der Hand heraus. Dabei schiebt sich die **NeaKarot** in die Hand.
- ♦ Anhand einer Scala von 1 – 12 können Sie nun die erforderliche Quengelintensität ablesen.
- ♦ Bitte achten Sie darauf, dass sich die Fingerkuppen nicht durch einen zu hohen Druck weiß verfärben.
- ♦ Die NeaKarot kann in der Waschmaschine bei 40°C gewaschen werden.
- ♦ Durch eingearbeitete Silberfäden wirkt die NeaKarot bakteriostatisch was bedeutet, dass Bakterien sich auf dem Gewebe nicht vermehren können.
- ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ♦ **Die NeaKarot Orthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**



LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 30/060710



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de