

Anziehanleitung



NeaKarot Air Fingerquengel

- ♦ Führen Sie zuerst die Schlaufe der **NeaKarot Air** durch die Öffnung des roten Anziehhilfestäbchens und legen die Schlaufe über den Nippel.
- ♦ Drehen Sie nun das Stäbchen um 180°.



Bild 1



Bild 2




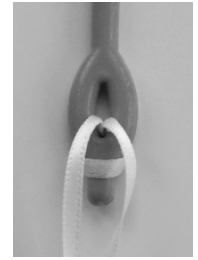


Bild 3

- ♦ Entfernen Sie zuerst sämtliche Luft aus der **NeaKarot Air**, indem Sie das Ventil mit den Fingern zusammendrücken oder das schwarze Ende des beiliegenden Blasebalges in das Ventil stecken und dieses etwas knicken.
- ♦ Führen Sie nun das Stäbchen von der Daumenseite kommend durch die Faust.
- ♦ Fassen Sie das Stäbchen und ziehen es an der Seite der Kleinfingers aus der Hand heraus. Dabei schiebt sich die **NeaKarot Air** in die Hand hinein.
- ♦ Anhand einer Scala von 1 – 12 können Sie nun die erforderliche Quengelintensität ablesen.
- ♦ Stecken Sie das durchsichtige Ende des Blasebalges in das Ventil, pumpen Sie Luft in die **NeaKarot Air** und schließen Sie das Ventil.
- ♦ Ventil reindrücken und das Band verknoten.
- ♦ **Das Innenteil nur so weit aufpumpen, dass keine Beule am Ventil entsteht. Es besteht die Gefahr, dass die Nähte undicht werden !**
- ♦ Bitte achten Sie darauf, dass sich die Fingerkuppen nicht durch einen zu hohen Druck weiß verfärben.
- ♦ Im Lieferumfang der **NeaKarot Air** ist ein Zweitbezug enthalten. Die Bezüge können bei 30°C Handwäsche gereinigt werden.
- ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ♦ **Die NeaKarot Air ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

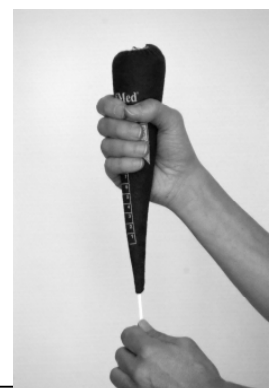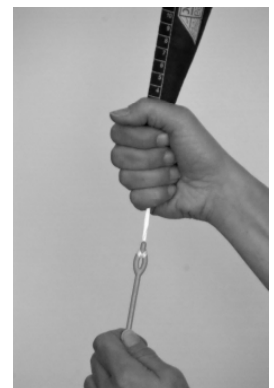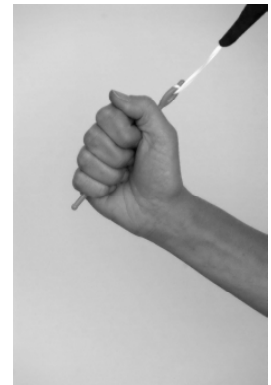

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 30/151010



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de