



NeaManex Radialisorthese



- ♦ Messen Sie den Umfang des Handgelenks und wählen Sie die passende Größe aus.
- ♦ Probieren Sie alle Teile. Die Form des Tieftemperatur-Materials können Sie mittels Schere noch verändern.
- ♦ Wir empfehlen, das thermoplastische Material vor dem Erhitzen in die dafür vorgesehene Tasche der NeaManex Radialisorthese einzuschieben.
- ♦ Erhitzen Sie nun genügend Wasser auf 65-70° C und gießen Sie dieses vorsichtig in die Tasche um das thermoplastische Material zu erhitzen. Nach wenigen Sekunden wird dieses weich. Am besten benutzen Sie hierzu einen kleinen Trichter und eine flache Plastikschüssel. Sobald das Tieftemperatur-Material leicht verformbar ist, legen Sie die Orthese kurz zwischen ein Handtuch und trocknen Sie diese leicht ab.
- ♦ Legen Sie die Schiene am Arm des Patienten an. Versichern Sie sich, dass das Handgelenk in optimaler Stellung ist und das Ulnarköpfchen in der Orthese eingeschlossen wird. Schließen Sie nun die Verschlussgurte leicht. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu fest angezogen sind, da sonst Abdrücke des Klettverschlusses im verformbaren Material entstehen können. Formen Sie nun die Schiene gut an.
- ♦ Nach ca. 3 Minuten hat das Material die nötige Festigkeit um die Orthese zu entfernen. Falls notwendig, drücken Sie leicht mit dem Finger in die Vertiefung für das Ulnarköpfchen um diese etwas zu vergrößern.
- ♦ Das Material ist nach ca. 5 Minuten so fest, dass es die Form behält. Sie können auch die angeformten Orthese unter das kalte Wasser halten, damit diese schneller erkaltet.
- ♦ Legen Sie nun die Orthese am Patienten an und verschließen Sie die Klettverschlüsse. Nehmen Sie die Fingerbandage und schieben den Mittel- und Ringfinger des Patienten durch die beiden mittleren Schlaufen. Zeige- und Kleinfinger fixieren Sie, indem Sie das Klettband um diese herumführen und auf dem Fingerrücken befestigen. Kletten Sie das Fingerteil auf dem Handrückenteil an. Korrigieren Sie ggf. die Fingerbandage noch einmal so, dass der Zug ausreichend ist, aber vom Patient noch gut toleriert wird.



LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 31/140311



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de

Anziehanleitung



NeaManex Radialisorthese



- ♦ Befestigen Sie nun das Daumenteil. Auch hier können Sie mittels des Klettverschlusses Festigkeit und Stellung des Daumens bestimmen.



- ♦ Falls die Orthese bei Nacht getragen wird oder ein Schwellungsrisiko besteht, kann, statt des Fingerteils, das beigelegte, extra weiche Band angelegt werden. Dieses kann mit der Schere entsprechend gekürzt werden.
- ♦ Die Orthese kann mit 30°C Handwäsche gewaschen werden.
- ♦ Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.
- ♦ Bei auftretenden Druckstellen oder vermehrten Schmerzen suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädie-Techniker auf.
- ♦ Die NeaManex Radialisorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.
- ♦ Materialzusammensetzung Bandage: 98% Neopren, 2% Polyamid,
Materialzusammensetzung Kunststoffschiene: 100% Polyurethan-Copolymer

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 31/140311



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de