

Anziehanleitung



NeaPed Fußorthese



- ◆ Versichern Sie sich, dass die vordere Dehnungsposition auf der Stufe 1 steht.
- ◆ Öffnen Sie das Zehen- und Wadenband.
- ◆ Schieben Sie den Fuß in die elastische Vorfußbandage, so dass die Orthese in der Mitte des Fußrückens aufliegt.
- ◆ Um die Orthese am Fuß zu fixieren, schließen Sie nun den Klettverschluss um den Vorfußballen.
- ◆ Legen Sie nun die Orthese an das Schienbein an und schließen Sie das breite Band um die Wade. Beachten Sie, dass Sie die Bänder nicht zu stark anziehen. Die Bänder sollten nicht einschneiden.

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 30/060710



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de

Anziehenanleitung



NeaPed Fußorthese



Hinweise für den Orthopädie-Techniker:

- ♦ Sie können die Bänder nach dem erstmaligen, korrekten Anlegen der Orthese kürzen.

Einstellen des Dehnungswinkels

- ♦ Clipsen Sie nun den Gummizug in die gewünschte Rasterung der Orthese um für den Patienten eine tolerierbare Dehnung zu erreichen. Beachten Sie, dass der Patient die Orthese die ganze Nacht tragen sollte.
- ♦ Der Dehnungsgrad kann bei angelegter und nicht angelegter Schiene eingestellt werden.
- ♦ Nehmen Sie dazu den Plastikclip zwischen Daumen und Zeigefinger, schieben diesen nach unten und positionieren Sie ihn neu.
- ♦ Beachten Sie, dass der Clip nach dem Einhängen richtig eingerastet ist.

Waschanleitung:

Das Neopren-Frotteepolster kann abgenommen und bei 30 °C Schonwäsche gewaschen werden.

- ♦ **Die NeaPed Fußorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**
- ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 30/060710



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de