

Anziehanleitung



NeaPed Basic Fußorthese



- ♦ Öffnen Sie die Klettverschlüsse im Waden- und Fußbereich.
 - ♦ Schieben Sie den Fuß in die elastische Vorfußbandage, so dass die Orthese in der Mitte des Fußrückens aufliegt.
 - ♦ Um die Orthese am Fuß zu fixieren, schließen Sie nun den Klettverschluss um den Vorfußballen.
 - ♦ Legen Sie nun die Orthese an das Schienbein an und schließen Sie das breite Band um die Wade.
 - ♦ Alternativ dazu können Sie auch auf den Fuß stehen, das Knie soweit anbeugen, dass die Orthese am Schienbein anliegt. Verschließen Sie nun das breite Band um die Wade.
 - ♦ Beachten Sie, dass Sie die Bänder nicht zu stark anziehen. Die Bänder sollten nicht einschneiden.
-
- ♦ **Die NeaPed Basic Fußorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**
 - ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 30/240610



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de