

Anziehanleitung




NeaPollfix kurz - lang



Für den Therapeuten oder Orthopädie-Techniker:

- ♦ Messen Sie den Umfang des Handgelenks und wählen Sie die passende Größe aus.
- ♦ Probieren Sie alle Teile. Die Form des Tieftemperatur-Materials können Sie mittels Schere noch verändern.
- ♦ Wir empfehlen, das thermoplastische Material vor dem Erhitzen in die dafür vorgesehene Tasche einzuschieben.
- ♦ Erhitzen Sie nun genügend Wasser auf 65 - 70° C und gießen Sie dieses vorsichtig in die Tasche um das thermoplastische Material zu erhitzen. Nach wenigen Sekunden wird dieses weich. Am besten benutzen Sie hierzu einen kleinen Trichter und eine flache Plastikschüssel. Sobald das Tieftemperatur-Material verformbar ist, legen Sie die Orthese kurz zwischen ein Handtuch und trocknen Sie diese leicht ab.
- ♦ Legen Sie die Schiene am Handgelenk und Daumen des Patienten an. Versichern Sie sich, dass der Patient die Wärme gut verträgt. Verschließen Sie nun die Verschlussgurte leicht. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu fest angezogen sind, da sonst Abdrücke des Klettverschlusses im verformbaren Material entstehen können. Formen Sie die Schiene am Daumen und Handgelenk gut an.
- ♦ Nach ca. 3 Minuten hat das Material die nötige Festigkeit um die Orthese zu entfernen. Falls nachträglich noch Korrekturen notwendig sind, können auch partiell diese Stellen erhitzt und nachgeformt werden.
- ♦ Das Material ist nach ca. 5 Minuten so fest, dass es die Form behält. Damit die Orthese schneller erkaltet, können Sie diese unter das kalte Wasser halten.
- ♦ **Die Orthese kann mit 30°C Handwäsche gewaschen werden.**
- ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ♦ **Bei auftretenden Druckstellen oder vermehrten Schmerzen suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädie-Techniker auf.**
- ♦ **Die NeaPollfix Orthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**
- ♦ Materialzusammensetzung Bandage: 98% Neopren, 2% Polyamid,
Materialzusammensetzung Kunststoffschiene: 100% Polyurethan-Copolymer

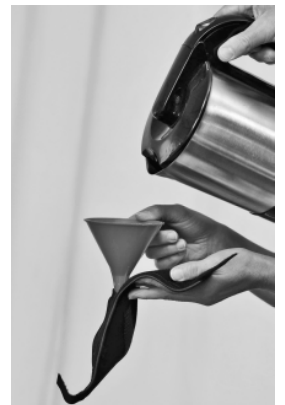

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 31/270111



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de