

# Anziehanleitung






## NeaRest Karpalorthese



Nehmen Sie die NeaRest Karpalorthese aus der Verpackung und öffnen Sie alle Verschlüsse.



- ◆ Legen Sie Hand und Unterarm des Patienten auf die Lagerungsorthese.
- ◆ Überprüfen Sie das Handgelenk und kontrollieren Sie die eingestellte Dorsalextension der Orthese, ebenso die Lage des Daumens.
- ◆ Falls erforderlich, können Sie die Kydexschiene thermoplastisch nachformen ( 120 – 140° C ):
  - ◆ Dazu entfernen Sie das Polster und die Klettverschlüsse. Erwärmen Sie die zu verformende Stelle des Kydexmaterials ca. 30 Sekunden. Bringen Sie nun die Schiene in die gewünschte Form und lassen Sie diese abkühlen. Falls weitere Nacharbeiten notwendig, verfahren Sie in der gleichen Weise.
- ◆ Positionieren Sie das Polster und die Klettverschlüsse wieder in der Schiene.
- ◆ Schließen Sie die Klettverschlüsse über dem Handgelenk und dem Unterarm.
- ◆ Schließen Sie nun den Klettverschluss über dem Handrücken. Das rechteckige Polster sollte über den Fingergrundgelenken liegen.
- ◆ Schließen Sie nun den Klettverschluss um den Daumen, so dass dieser sicher auf der Daumenaufgabe liegt.

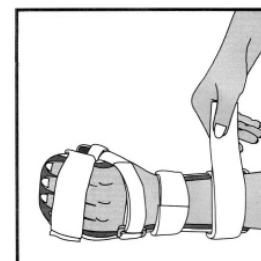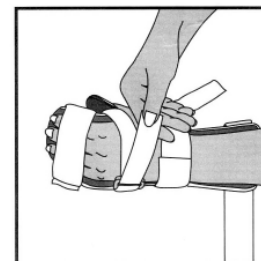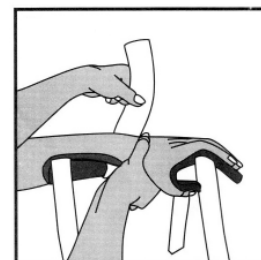

### Waschanleitung für Polster und Klettverschlüsse

Entfernen Sie die Polster und Klettverschlüsse und schließen Sie diese.

Polster und Klettverschlüsse können in einer milden Seifenlauge von Hand gewaschen werden. Benutzen Sie keinen Weichspüler und trocknen Sie die Überzüge **nicht im Trockner**.

- ◆ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ◆ **Die NeaRest Karpalorthese ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**
- ◆ **Vermeiden Sie den Kontakt mit offener Flamme, da sich das Material entzünden kann.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 21/281010



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 [www.neatec.de](http://www.neatec.de) [info@neatec.de](mailto:info@neatec.de)