

Anziehenanleitung



NeaTrachea Cervicalstütze



Legen Sie die Cervicalstütze möglichst mit einer Hilfsperson an, wie es Ihnen der Arzt bzw. Orthopädietechniker gezeigt hat !

In der folgenden Anziehenanleitung ist das korrekte Anlegen der NeaTrachea Cervicalstütze beschrieben.

- Legen Sie die hintere Halbschale an den Nacken an.



- Legen Sie nun die vordere Halbschale vorne an, so dass das Kinn korrekt in der dafür vorgesehenen Kinnstütze liegt. Die Halswirbelsäule sollte dabei gerade sein, der Kopf sollte nach vorne ausgerichtet sein. Die vordere Schale überlappt die hintere.
- Verbinden Sie die beiden Schalen mit den seitlich angebrachten Klettbindern und fixieren Sie so die Cervicalstütze.



Bei Verschmutzungen können Sie die Cervicalstütze mit einer leichten, handwarmen Seifenlauge abwaschen. Die Cervicalstütze kann beim Duschen getragen werden.

Bei auftretenden Druckstellen oder vermehrten Schmerzen suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädie-Techniker auf.

- ♦ **Das Produkt wurde auf Hautverträglichkeit getestet.**
- ♦ **Die NeaTrachea Cervicalstütze ist nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.**

LOT-Nummer bitte für evtl. Beanstandungen aufbewahren

LOT 11/210111



Bestellung Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289 www.neatec.de info@neatec.de