


NeaTrachea Cervicalstütze



Richtiges Maßnehmen einer NeaTrachea Cervicalstütze

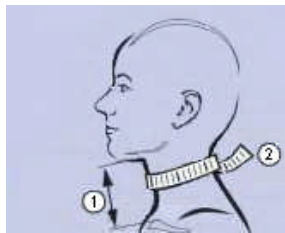

So ermitteln Sie die richtige Größe der NeaTrachea Cervicalstütze

1. Die Halshöhe ermitteln Sie, indem Sie den Halsumfang in der Mitte des Halses messen. Legen Sie das Maßband so an, dass es bündig aber dennoch locker am Hals anliegt. Es sollte Abstand zwischen Maßband und Hals sein.

Maß Nr. 2

Durch den Halsumfang werden die Größen S - M festgelegt.

Beispiel: Halsumfang 35 cm entspricht der Größe M.

2. Die Halshöhe ermitteln Sie, indem Sie das Maßband an der Kinnunterkante anlegen und bis zur Höhe des Sterno-Clavicular-Gelenkes messen. **Maß Nr. 1**
Durch die Halshöhe werden die die Größen 2 1/4 – 5 1/4 festgelegt.

Beispiel: Halshöhe 8,5 cm entspricht der Größe 3 1/4.

Beachten: Der Kopf sollte gerade gehalten werden mit Blick nach vorne und nicht nach unten oder oben abgeknickt werden.