

Gebrauchsanweisung

Solo Geradehalter + Geradehalter



Technische Eigenschaften:

- Satin / Baumwollstoff, vollständig mit 100% Baumwolle gefüttert
- Weiche Achselpolsterung
- Klettverschluss vorne

Indikationen

Haltungsfehler, BWS-Kyphosen, Rückenschmerzen

Anziehanleitung

- ♦ Nehmen Sie die beiden Teile des Geradehalters und wählen Sie das mit dem Etikett „rechts“ gekennzeichnete Teil aus.
- ♦ Schlüpfen Sie nun mit dem rechten Arm durch die dafür vorgesehene Armschleufe. Der gepolsterte Baumwollschlauch sollte an der vorderen Seite des Achsel-Schulterbereichs aufliegen und gut sitzen.
- ♦ Schlüpfen Sie nun genauso mit dem linken Arm in den verbleibenden mit „links“ gekennzeichneten Teil des Geradehalters.
- ♦ Fassen Sie nun mit beiden Händen nach hinten bzw. zur Seite und greifen Sie die Enden des jeweiligen von der gegenüberliegenden Schulter kommenden Teils.
- ♦ Schließen Sie nun beide Teile mit dem Klettverschluss unterhalb der Brust.
- ♦ Beim kombinierbaren Geradehalter befestigen Sie diesen auf dem Vorderteil des Dorsolign Stützmieters
- ♦ Der Geradehalter sollte so fest angezogen werden, dass ein Zurückziehen der Schulter deutlich spürbar ist.

Pflegeanleitung:

- ♦ Vor dem Waschen alle Klettverschlüsse schließen.
- ♦ Waschen Sie die Orthese mit Handwäsche und milder Seifenlauge.
- ♦ Nicht schleudern
- ♦ Nicht an Hitzequellen trocknen oder aufbewahren
- ♦ Nicht bügeln

Warnhinweise:

Benutzen Sie die korrekte Größe und ersetzen die Orthese bei starken Gewichts- und Größenveränderungen. Wir empfehlen, die Orthese nicht bei Nacht zu tragen.

Entfernen Sie nicht das innere Etikett, da dieses wichtige Informationen zu Ausführung, Größe und LOT Nummer enthält.

Es sind keine Gegenanzeigen beim korrekten Gebrauch der Orthese bekannt.

Medizinprodukt Klasse I – entspricht den Anforderungen und ist konform mit der MDR 2017/745



Hersteller:



TLM srl., Via per Uboldo 48, I-21040 Gerenzano (VA)

Company with UNI EN ISO9001 and UNI EN ISO 13485 Quality Management System certified by Certiquality

Vertrieb:



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm www.neatec.de