

Gebrauchsanweisung



Barnie - Kind

1. Wichtige Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und beachten Sie alle Hinweise sorgfältig!

- ◆ Die Orthese darf nur nach ärztlicher Anweisung sowie individueller Anpassung und Einweisung in den Gebrauch durch einen Orthopädietechniker getragen werden.
- ◆ Prüfen Sie bitte vor jedem Anlegen die Orthese auf Beschädigungen an Verschlüssen, Gurten usw.
- ◆ Beachten Sie, dass falsche Anpassung / Anwendung oder mangelhafte Kontrolle der Passform zu gesundheitlichen Schädigungen führen kann.
- ◆ Achten Sie auf die Einhaltung der Umgebungs- und Lagerbedingungen für das Produkt.
- ◆ Die Orthese ist nur für einen einzelnen Patienten verwendbar und darf nach abgeschlossener Behandlung nicht wieder verwendet werden.
- ◆ Übermäßiger Druck kann zu Durchblutungsstörungen und Hautschäden führen. Treten unter der Anwendung Beschwerden auf oder tritt eine Verschlechterung ein, dann konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädietechniker.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt nicht bei den genannten Kontraindikationen, bei offensichtlicher Beschädigung oder Störung sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eines der genannten Materialien.
- ◆ Bei der Anwendung der Orthese an Kindern darf das Anlegen und Abnehmen der Orthese nur durch einen erwachsenen Angehörigen oder eine Pflegekraft erfolgen.
- ◆ Der Patient darf die vom Arzt oder Orthopädietechniker vorgenommenen Einstellungen der Orthese weder ändern noch irgendwelche Manipulationen vornehmen.
- ◆ Die Orthese niemals direkt auf verletzter Haut tragen.
- ◆ Bei unsachgemäßem Einsatz und unsachgemäßen Veränderungen an der Orthese ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

2. Anwendungszweck

Kontrollierte Dehnung bei Spitzfuß, Behandlung und Vorbeugung von Fersendekubiti durch Freilagerung der Ferse, Korrektur der In- und Eversion.

3. Indikationen

Kontrollierte Dehnung der Plantarflexoren, Fersendekubitus, Redression des Fußes in die Dorsalextension, Alternativ zu geschlossenen Gipsversorgungen

4. Kontraindikationen

Spitzfuß, Unverträglichkeit mit eines der verwendeten Materialien, nicht direkt auf verletzter Haut tragen, schwere Plantarflexionsspastiken, nicht zum Gehen geeignet

5. Produktkomponenten, Maße und Größen

Fußlänge	
12 – 18 cm	12 UK 01

6. Produktanwendung (Für Patient und Orthopädie-Techniker)

- ◆ Beugen Sie das Knie des Kindes leicht an und legen Sie den Fuß so weit wie möglich in die Orthese. Drücken Sie mit der Handfläche den Fuß über dem Sprunggelenk leicht in die Orthese. Die Ferse darf jedoch an der dorsalen Schiene nicht anliegen.
- ◆ Schließen Sie nun das textile Fußteil über dem Fußrücken und schließen Sie die Klettverschlüsse über die Umlenker.
- ◆ Schließen Sie dann das Band über dem Sprunggelenk.
- ◆ Schließen Sie nun den Velcroverschluss über dem Unterschenkel.
- ◆ Kontrollieren Sie die Fußstellung. Der Fuß sollte flächig aufliegen und die Ferse nicht an der dorsalen Schiene anliegen.
- ◆ Die Zehenextension bzw. der Zehenschutz soll entsprechend der Fußlänge eingestellt werden.
- ◆ Der Ausleger an der Unterschenkelschiene kann nach links oder rechts ausgeklappt werden, um eine ungewünschte Rotation des Beines zu verhindern.



Gebrauchsanweisung



Barnie - Kind

Redressionseinstellung

Drehen Sie an beiden Seiten die Schrauben gleichzeitig im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Winkel zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Die Gradzahlen können am Gewinde abgelesen werden.

Inversions- Eversionszügel

Um die Inversion oder Eversion zu beeinflussen wird der beigelegte Zügel in Höhe der Ferse über die Kydexschiene gelegt, unter den Redressionsstäben durchgeführt und seitlich mit der Öse und dem Klettverschluss verschlossen. Je nach gewünschter Korrektur wird der Zügel rechts oder links geschlossen und somit der Zug in die In- oder Eversion ausgeführt.

Zusatzpolster

Das beigelegte Zusatzpolster kann über dem Fußrücken im Sinne einer Zunge verwendet werden oder aber als Innenpolster im Fersenbereich, wenn eine Freilegung der Ferse nicht erwünscht oder erforderlich ist.

7. Material

Nylon, Kydex, PU-Schaum, Polyester

8. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

Nehmen Sie den Bezug und den Überzug für die Vorfußverlängerung von der Orthese und schließen Sie alle Klettverschlüsse. Die Bezüge können bei 30°C Handwäsche mit einem milden Waschmittel gewaschen werden. An der Luft trocknen und **nicht im Trockner**. Nicht bügeln. Die Kunststoffschale kann mit einer warmen Seifenlauge abgewaschen werden.

9. Einsatzbedingungen, Lagerung und Entsorgung

Vor Verschmutzung und starkem Lichteinfluss schützen. Möglichst trocken und bei Raumtemperatur in der Originalverpackung aufbewahren. Die Orthese enthält keine umweltgefährdenden Stoffe und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

10. Bildzeichenerklärung

	Los-Nummer
REF	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung beachten!
CE	Konformität mit den Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
	Hersteller

11. Hersteller / Vertrieb



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm
Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289
www.neatec.de info@neatec.de



12. Revisionsstand: Stand Juni 2015