

Gebrauchsanweisung

Repocox Hüftorthese

1. Wichtige Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und beachten Sie alle Hinweise sorgfältig!

- ◆ Die Orthese darf nur nach individueller Anpassung und Einweisung in den Gebrauch durch einen Orthopädietechniker oder medizinischem Fachpersonal getragen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die passende Größe verwendet wird.
- ◆ Tragen Sie unter der Orthese immer ein Unterhemd oder T-Shirt und tragen Sie die Orthese nicht bei Nacht.
- ◆ Entfernen Sie nicht das eingenähte Etikett da dieses wichtige Informationen enthält.
- ◆ Die Orthese ist nur für einen einzelnen Patienten verwendbar.
- ◆ Der Patient darf die vom Orthopädietechniker vorgenommenen Einstellungen der Orthese weder ändern noch irgendwelche Manipulationen vornehmen.
- ◆ Bei unsachgemäßem Einsatz und unsachgemäßen Veränderungen an der Orthese ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.
- ◆ Bei schweren Vorfällen in Zusammenhang mit dem Produkt muss der Hersteller, Händler und die zuständige Behörde informiert werden.

2. Anwendungszweck

Die Hüftorthese dient zur Führung und Fixierung des Hüftgelenks. Die Kombination aus Zuggurtung und Pelotte zusammen mit der zirkulär geschlossenen Bandage erhöhen den Kompressionsdruck des Hüftkopfs in Richtung Hüftpfanne. Die Orthese ist zur langzeitigen Anwendung zweckbestimmt.

3. Indikationen

Hüftluxation nach Hüftgelenksimplantation



4. Kontraindikationen

Großflächige Hautverletzungen, chronisch venöse Insuffizienz, arterielle Verschlusskrankheit

5. Produktkomponenten, Maße und Größen

Größe	Taillenumfang	Oberschenkelumfang	Rechts	Links
XS	60 – 85	40 – 55	12 U 001	12 U 002
S	75 – 100	50 – 65	12 U 003	12 U 004
M	90 – 115	55 – 70	12 U 005	12 U 006
L	105 – 130	60 – 75	12 U 007	12 U 008

Alle Maße in cm

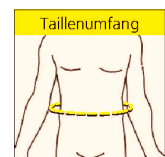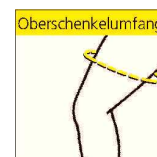

6. Produktanwendung (Für Patient und Orthopädie-Techniker)



- Fixieren Sie die Hüftorthese mit Hilfe des Klettverschlusses fest um die Taille. Der vertikale Oberschenkelteil der Hüftorthese sollte dabei über die Außenseite der betroffenen Hüfte und des Oberschenkels verlaufen.
- Klappen Sie nun das untere Teil nach oben und positionieren Sie die Hüftpelotte so, dass der obere Rand direkt unter dem Trochanter Major anliegt.



- Führen Sie nun das hochgeklappte Oberschenkelteil nach unten. Sie fixieren dadurch die Pelotte mit Hilfe des Klettverschlusses.
- Schließen Sie anschließend das quer verlaufende untere Teil der Hüftorthese fest um den Oberschenkel.



- Nehmen Sie nun das beiliegende Elastikband und fixieren Sie den Kreuzungspunkt des Bandes in Höhe der Pelotte. Die beiden kurzen Schlaufenenden sollten hierbei jeweils im 45° Winkel nach vorne unten bzw. hinten unten zeigen. Das lange Schlaufenende zeigt somit nach vorne oben.
- Führen Sie die beiden auf der Innenseite des Oberschenkelteils angenähten Elastikbänder jeweils durch die entsprechenden nach unten zeigenden Metallschlaufen und fixieren diese.

Gebrauchsanweisung

Repocox Hüftorthese

- Nehmen Sie nun das nach hinten führende lange Elastikband, legen es von hinten in die gegenüber-liegende Taille und führen es durch die obere Metallschlaufe. Fixieren Sie das Band so fest wie möglich.

7. Material

Baumwolle, Polyamid, Gummimaterial

8. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

Schließen Sie den Klettverschluss und waschen Sie die Orthese bei 30°C Handwäsche mit mildem Feinwaschmittel. Verwenden Sie keine scharfen Wasch- oder Bleichmittel. Bitte trocknen Sie die Orthese an der Luft und **nicht im Trockner**. Nicht bügeln.

9. Einsatzbedingungen, Lagerung und Entsorgung

Die Orthese enthält keine umweltgefährdenden Stoffe und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

10. Hersteller: TLM srl., Via per Uboldo 48, I-21040 Gerenzano - www.tlm.it

11. Vertrieb:



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm - www.neatec.de