





## 1- BESCHREIBUNG

Die Rizofix Daumenfixierung darf nur zusammen mit der M-Brace Handorthese verwendet werden.

Die Hauptmerkmale der M-Brace Handorthese mit Rizofix sind:

- ein hochentwickeltes atmungsaktives Gewebe mit hohem Tragekomfort
- rechte und linke Ausführung
- eine Struktur, die ganz geöffnet werden kann und das Anlegen der Orthese einfach und schmerzfrei macht.
- individuell anformbar
- RIZOFIX, das patentierte System für die Ruhigstellung des Daumens, immobilisiert diesen von der Innenseite aus, während die entgegengesetzte Seite frei gelassen wird. RIZOFIX fixiert den Daumen effektiv und lässt sich einfach an die individuellen Bedürfnisse anpassen.

Entsprechend den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte sowie entsprechend dem italienischen Gesetz (LD Nr. 46 vom 24. Februar 1997) zur Umsetzung genannter EU-Richtlinie gefertigt.

## 2- INDIKATIONEN – M-Brace Handorthese mit RIZOFIX Daumenfixierung

- Karpaltunnelsyndrom.
- Posttraumatisch.
- Prä- und Postoperativ.

### 2-1 GEBRAUCHSANLEITUNG

- Prüfen Sie, ob rechte oder linke Ausführung benötigt wird.
- RIZOFIX entsprechend Abbildung 1-4 anbringen.

## 3- NEBENWIRKUNGEN UND KONTRAINDIKATIONEN

- 4- Unter der Voraussetzung, dass die Produkte entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet werden, und angesichts der Tatsache, dass sie nicht invasiv sind, gibt es keine Nebenwirkungen, die den Organismus im Ganzen betreffen. Orthesen und Bandagen können, wenn sie zu eng angelegt werden, Beschwerden aufgrund der Kompression verursachen. Sollten Sie Schmerzen, Schwellungen oder Reizungen bekommen, kontaktieren Sie Ihren Orthopädietechniker oder Arzt. Bei längeren Ruhezeiten wird empfohlen, die Bänder der Orthese etwas zu lockern. Bei normaler Aktivität sollte die ursprünglich empfohlene Befestigungsspannung wiederhergestellt werden.
- 5- Weitere Veränderungen an der Orthese, außer den oben genannten, führen zum Verlust der Gewährleistung und jeglicher Haftung unsererseits.

## 6- WARTUNG UND PFLEGE

- Keine besondere Wartung erforderlich.
- Die Handgelenksstütze falten und die Klett-Pads fest an der Oberfläche befestigen.
- Schonend in lauwarmem Wasser waschen.
- Keine chlorhaltigen Substanzen verwenden.
- An der Luft trocknen.
- Vor dem Waschen das RIZOFIX-System entfernen.

Dieses Medizinprodukt ist nicht biologisch abbaubar.

Nach dem Ende der Nutzung im normalen Hausmüll entsorgen.