

Gebrauchsanweisung



Fixationskniechiene

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und beachten Sie alle Hinweise sorgfältig!

- Die Orthese darf nur nach ärztlicher Anweisung sowie individueller Anpassung und Einweisung in den Gebrauch durch einen Orthopädietechniker getragen werden.
- Prüfen Sie bitte vor jedem Anlegen die Orthese auf Beschädigungen an Verschlüssen, Gurten usw.
- Beachten Sie, dass falsche Anpassung / Anwendung oder mangelhafte Kontrolle der Passform zu gesundheitlichen Schädigungen führen kann.
- Achten Sie auf die Einhaltung der Umgebungs- und Lagerbedingungen für das Produkt.
- Die Orthese ist nur für einen einzelnen Patienten verwendbar und darf nach abgeschlossener Behandlung nicht wieder verwendet werden.
- Übermäßiger Druck kann zu Durchblutungsstörungen und Hautschäden führen. Treten unter der Anwendung Beschwerden auf oder tritt eine Verschlechterung ein, dann konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädietechniker.
- Verwenden Sie das Produkt **nicht** bei den genannten Kontraindikationen, bei offensichtlicher Beschädigung oder Störung sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eines der genannten Materialien.
- Bei der Anwendung der Orthese an Kindern darf das Anlegen und Abnehmen der Orthese nur durch einen erwachsenen Angehörigen oder eine Pflegekraft erfolgen.
- Der Patient darf die vom Arzt oder Orthopädietechniker vorgenommenen Einstellungen der Orthese weder ändern noch irgendwelche Manipulationen vornehmen.
- Die Orthese niemals direkt auf verletzter Haut tragen.
- Bei unsachgemäßem Einsatz und unsachgemäßen Veränderungen an der Orthese ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

2. Anwendungszweck

Die Fixationskniechiene dient zur Immobilisierung und Ruhigstellung des Kniegelenks. Aufgrund der variablen Verschlussleisten ist eine genaue individuelle Anpassung an den Beinumfang möglich.

Die Fixationskniechiene gibt es in Streckstellung (gerade Form) und in 20°-Beugstellung und in unterschiedlichen Längen.

3. Indikationen

Präoperativen Schmerzzuständen, Bandverletzungen, Nach Meniskus- und Bandoperationen, Insertionstendopathien, leichte Kapselbandverletzungen

4. Kontraindikationen

Arterielle Verschlusskrankheit, großflächige Hautverletzungen, großflächige Ödeme, Chronisch venöse Insuffizienz, Unverträglichkeit mit einem der Materialien

5. Produktkomponenten, Maße und Größen

Größe	Längenmaß	Gerade	20 ° Beugstellung
Kleinkind	30	01 K 000	
Kind	40	01 K 003	
Kurz	50	01 K 001	01 K 004
Lang	60	01 K 002	01 K 006
Extra weit	50	01 K 007	
Extra weit	60	01 K 008	

Alle Maße in cm



6. Installation / Anpassung (Für Patient und Orthopädietechniker)

- Ermitteln Sie den Beinumfang Ihres Patienten und korrigieren Sie den Sitz der seitlichen Teile der Fixationskniechiene entsprechend dem Beinumfang. Kletten Sie die Seitenteile so ein, dass alle 3 Teile zusammen dem Beinumfang Ihres Patienten entsprechen.
- Legen Sie nun die Chiene an der dorsalen hinteren Seite des Beines am Patienten an und legen Sie die beiden seitlichen Teile nach vorne, so dass sie auf der ventralen vorderen Seite aneinander stoßen oder leicht überlappen.
- Die Kniescheibe sollte in der dafür vorgesehenen Aussparung liegen.
- Verschließen Sie nun die Klettverschlüsse so, dass die Chiene fest sitzt aber für den Patienten noch angenehm ist.

7. Material

Nylon, PU Schaum, Baumwolle

8. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

Die Chiene kann bei 30°C Handwäsche mit einer leichten Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Wasch- oder Bleichmittel. Bitte trocknen Sie die Chiene an der Luft und **nicht im Trockner**. Nicht bügeln.

9. Einsatzbedingungen, Lagerung und Entsorgung

Möglichst trocken und bei Raumtemperatur in der Originalverpackung aufbewahren. Vor Verschmutzung und starkem Lichteinfluss schützen. Die Orthese enthält keine umweltgefährdenden Stoffe und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

10. Bildzeichenerklärung

	Los-Nummer
	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung beachten!
	Konformität mit den Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
	Hersteller

11. Hersteller / Vertrieb:



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm
Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289
www.neatec.de info@neatec.de



12. Revisionsstand: Stand Januar 2013