

# Gebrauchsanweisung



## Maxxcare Heel Pro Evolution Fußorthese

### 1. Wichtige Sicherheitshinweise:

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und beachten Sie alle Hinweise sorgfältig!**

- ◆ Die Außenseite an der Ferse der Maxxcare Heel Pro Evolution Fußorthese ist sehr rutschig. Belasten Sie die Ferse nicht, wenn Sie aufstehen oder während Sie gehen.
- ◆ Tragen Sie die Maxxcare Heel Pro Evolution Fußorthese nicht beim Herauf-oder Herabsteigen einer Treppe.
- ◆ Die Maxxcare Heel Pro Evolution Fußorthese ist für den individuellen Gebrauch gedacht. Das Produkt darf nur von der Person, deren Name auf dem Etikett steht verwendet werden.
- ◆ Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Wenn das Produkt beschädigt ist, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.
- ◆ Die Maxxcare Heel Pro Evolution Fußorthese sollte nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck verwendet werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Fahrlässigkeit verursacht wurden haftbar gemacht werden.
- ◆ Um Schäden zu vermeiden verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Hochtemperatur-Wärmequellen, offenen Flammen oder scharfen Gegenständen.

### 2. Anwendungszweck

Die Maxxcare Heel Pro Evolution Fußorthese wird verwendet um den Druck auf Ferse und Knöchel zu reduzieren. Die Orthese enthält 4 abnehmbare Luftröhrchen, die Schutz gegen Druck bieten. Die extrem glatte äußere Oberfläche bietet Schutz gegen Scherkräfte und Reibung. Die Maxxcare Heel Pro Evolution kann im Liegen und Sitzen verwendet werden. Kurzes Gehen im Innenbereich (z.B. vom Bett ins Badezimmer) ist mit Hilfe einer Hilfsperson möglich, da das rutschfeste Material an der Unterseite das Risiko des Ausrutschens reduziert. Achten Sie aber darauf, die Ferse beim Gehen nicht zu belasten, da die äußere Oberfläche rund um die Ferse sehr rutschig ist.

### 3. Indikationen

Verwenden Sie die Maxxcare Heel Pro Evolution um Fersen- und/oder Knöchelgeschwüre für Patienten mit einem erhöhten Risiko von Druckstellen zu verhindern.

Als weitere therapeutische Maßnahme bei Patienten mit bestehendem Fersendekubitus

Um Fersenschmerzen bei längerer Bettruhe zu reduzieren.

Um Spitzfuß zu verhindern.

### 4. Größen

Größe	Umfang in cm Ferse-Spann	
Standard	38 - 43	MC 6001
S	< 38	MC 6002
XL	> 43	MC 6003

### 5. Produkthanwendung (Für Patient und Orthopädie-Techniker)

**Achtung:** Nicht zu fest fixieren. Dies kann zu einer Verminderung der Durchblutung und/oder zu Unbehagen führen.

- ◆ Überprüfen Sie ob die Größe der Orthese korrekt ist.
- ◆ Überprüfen Sie die Orthese regelmäßig auf defekte Luftröhrchen und auf andere Schäden.
- ◆ Schreiben Sie den Namen des Patienten auf das Etikett.
- ◆ Öffnen Sie die Velcrobänder.
- ◆ Platzieren Sie den Fuß des Patienten in der Orthese.
- ◆ Fixieren Sie die Velcrobänder (nicht zu straff)

### 6. Wartung

**Waschanleitung:** siehe Pflegeetikett

Tipp: Der Heel Protector Pro Evolution kann gewaschen werden ohne die Luftröhrchen zu entfernen. **BITTE BEACHTEN**

**SIE: Immer an der Luft trocknen lassen und nur benutzen wenn das Produkt vollständig trocken ist.**

Folgen Sie der Instruktion für das Entfernen und Einsetzen der Luftröhrchen:

1. Öffnen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite der Orthese.
2. Entnehmen Sie die großen oder kleinen Luftröhrchen.
3. Alle Luftröhrchen wieder einsetzen bevor Sie die Orthese wieder benutzen.

**Bitte beachten Sie:** Stellen Sie beim Einfügen der großen Luftröhrchen sicher, dass die flache Seite ganz an der Rückseite des Heel Pro Evolution anliegt.

	Maxxcare B;V; Bruynwisweg 5, 1531 AX Wormer, Niederlande
Vertrieb	neaTec GmbH, Dieselstr. 6, Neu-Ulm - www.neatec.de