

Gebrauchsanweisung



Kallassy Sprunggelenkbandage

1. Wichtige Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und beachten Sie alle Hinweise sorgfältig!

- ◆ Die Orthese darf nur nach ärztlicher Anweisung sowie individueller Anpassung und Einweisung in den Gebrauch durch einen Orthopädietechniker getragen werden.
- ◆ Prüfen Sie bitte vor jedem Anlegen die Orthese auf Beschädigungen an Verschlüssen, Gurten usw.
- ◆ Beachten Sie, dass falsche Anpassung / Anwendung oder mangelhafte Kontrolle der Passform zu gesundheitlichen Schädigungen führen kann.
- ◆ Achten Sie auf die Einhaltung der Umgebungs- und Lagerbedingungen für das Produkt.
- ◆ Die Orthese ist nur für einen einzelnen Patienten verwendbar und darf nach abgeschlossener Behandlung nicht wieder verwendet werden.
- ◆ Übermäßiger Druck kann zu Durchblutungsstörungen und Hautschäden führen. Treten unter der Anwendung Beschwerden auf oder tritt eine Verschlechterung ein, dann konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädietechniker.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt nicht bei den genannten Kontraindikationen, bei offensichtlicher Beschädigung oder Störung sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eines der genannten Materialien.
- ◆ Bei der Anwendung der Orthese an Kindern darf das Anlegen und Abnehmen der Orthese nur durch einen erwachsenen Angehörigen oder eine Pflegekraft erfolgen.
- ◆ Der Patient darf die vom Arzt oder Orthopädietechniker vorgenommenen Einstellungen der Orthese weder ändern noch irgendwelche Manipulationen vornehmen.
- ◆ Die Orthese niemals direkt auf verletzter Haut tragen.
- ◆ Bei unsachgemäßem Einsatz und unsachgemäßen Veränderungen an der Orthese ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

2. Anwendungszweck

Die Kallassy Sprunggelenkbandage dient der Stabilisierung des Sprunggelenks zur Prophylaxe bei chronischer Bandinstabilität während Sport, konservative und postoperative Therapie. Leichte Kompression wird erzeugt durch die zirkulär geschlossene Bandage. Die beiden Außenzügel werden in korrigierter Stellung des Sprunggelenks - (Pronation = Außenrand des Fußes hochgezogen) durch Klettverschlüsse fixiert, was eine Bewegung in die Fehlstellung verhindert.

3. Indikationen


Sprunggelenkdistorsionen, Bandrupturen konservativ und präoperativ, Bandinstabilitäten

4. Kontraindikationen

Großflächige Verletzungen der Haut, starke Ödeme, Stauungen im lymphatischen System, Durchblutungs- und Sensibilitätsstörungen im Bein, Überempfindlichkeit gegen eines der verwendeten Materialien.

5. Produktkomponenten, Maße und Größen

Größe	Schuhgröße	Rechts	Links
XXS	- 35	02 K 009	02 K 010
XS	35 – 39	02 K 001	02 K 002
S/M	39 – 44	02 K 003	02 K 004
L/XL	44 – 48	02 K 005	02 K 006
XXL	48 – 52	02 K 007	02 K 008
XXXL	52 -	02 K 011	02 K 012

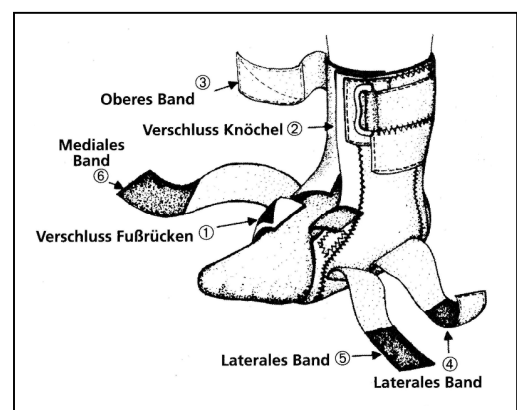

6. Produkthanwendung (Für Patient und Orthopädie-Techniker)



Lösen Sie alle Klettverschlüsse, bevor Sie die Bandage anlegen. Der Fuß muss rechtwinklig am Boden stehen. Versichern Sie sich, dass die Ferse so weit wie möglich nach hinten in die Bandage geschoben wird. Schließen Sie nun den Verschluss über dem Fußrücken. ①

Gebrauchsanweisung

Kalassy Sprunggelenkbandage



Schließen Sie danach den Klettverschluss um den Knöchel. ② Wenn Falten entstehen, korrigieren Sie den Verschluss über dem Fußrücken noch einmal. ①



Nehmen Sie nun das obere Band oberhalb des Knöchels und ziehen es durch die Plastikschnalle fest an. ③



Heben Sie die Fußaußenseite an, während die Innenkante des Fußes noch den Boden berührt. In dieser Stellung befestigen Sie zuerst das kürzere ④ und danach das längere ⑤ Band auf dem seitlichen Klettverschluss. Bitte beachten Sie, dass die beiden Bänder kräftig angezogen sind.



Das lange mediale Band ⑥ wird nun straff von der Großzehenseite kommend nach außen oben über die beiden seitlichen Bänder nach hinten um den Knöchel gezogen und auf dem Knöchelverschluss befestigt.

7. Material

Nylon, Neopren, Polyester

8. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

Schließen Sie die Klettverschlüsse und waschen Sie die Orthese bei 30°C Handwäsche. Verwenden Sie keine scharfen Wasch- oder Bleichmittel. Bitte trocknen Sie die Orthese an der Luft und **nicht im Trockner**. Nicht bügeln.

9. Einsatzbedingungen, Lagerung und Entsorgung

Vor Verschmutzung und starkem Lichteinfluss schützen. Möglichst trocken und bei Raumtemperatur in der Originalverpackung aufbewahren. Die Orthese enthält keine umweltgefährdenden Stoffe und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

10. Bildzeichenerklärung

	Los-Nummer
REF	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung beachten!
CE	Konformität mit den Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
	Hersteller

11. Hersteller / Vertrieb:



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm
Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289
www.neatec.de info@neatec.de



12. Revisionsstand: Stand Januar 2013