

Gebrauchsanweisung



NeaDekuPed Lagerungssorthese

1. Wichtige Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und beachten Sie alle Hinweise sorgfältig!

- ◆ Die Orthese darf nur nach ärztlicher Anweisung sowie individueller Anpassung und Einweisung in den Gebrauch durch einen Orthopädietechniker getragen werden.
- ◆ Die Orthese ist nicht zum Stehen und Laufen geeignet sondern darf nur zum Lagerung des Beines verwendet werden.
- ◆ Beachten Sie, dass falsche Anpassung / Anwendung oder mangelhafte Kontrolle der Passform zu gesundheitlichen Schädigungen führen kann.
- ◆ Achten Sie auf die Einhaltung der Umgebungs- und Lagerbedingungen für das Produkt.
- ◆ Die Orthese ist nur für einen einzelnen Patienten verwendbar und darf nach abgeschlossener Behandlung nicht wieder verwendet werden.
- ◆ Übermäßiger Druck kann zu Durchblutungsstörungen und Hautschäden führen. Treten unter der Anwendung Beschwerden auf oder tritt eine Verschlechterung ein, dann konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädietechniker.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt nicht bei den genannten Kontraindikationen, bei offensichtlicher Beschädigung oder Störung sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eines der genannten Materialien.
- ◆ Bei der Anwendung der Orthese an Kindern darf das Anlegen und Abnehmen der Orthese nur durch einen erwachsenen Angehörigen oder eine Pflegekraft erfolgen.
- ◆ Kontrollieren Sie Fuß und Knöchel regelmäßig auf Rötungen und Reizungen oder Schädigungen der Haut. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt oder Orthopädietechniker in Verbindung.
- ◆ Die Orthese niemals direkt auf verletzter Haut tragen.
- ◆ Bei unsachgemäßem Einsatz und unsachgemäßen Veränderungen an der Orthese ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

2. Anwendungszweck

Die Lagerungssorthese dient zur Lagerung des Fußes in Liegeposition mit Freilagerung der Ferse.

3. Indikationen

Fersendekubitus und alle Krankheitsbilder bzw. der Pflegezustand des Patienten, die eine Lagerung des Beines zur Behandlung von Dekubitus notwendig machen.

4. Kontraindikationen

Überempfindlichkeit gegen eines der verwendeten Materialien.

5. Produktkomponenten, Maße und Größen

Universalgröße

Maße: Höhe: 35 cm Breite: 15 cm Tiefe: 32 cm

Gewicht: 0,5 kg

6. Produkthanwendung (Für Patient und Orthopädie-Techniker)

Entfernen Sie alle Bänder und Verschlüsse.

Drehen Sie die NeaDekuPed Lagerungssorthese von innen nach außen, so dass die graue Seite nach außen zeigt.

Legen Sie die Orthese auf das Bett, mit der langen Seite zur Wade des Patienten.

Positionieren Sie den Fuß des Patienten auf die NeaDekuPed Lagerungssorthese, so dass die Ferse über der dafür vorgesehenen Öffnung liegt und ziehen Sie die Orthese um den Fuß.

Befestigen Sie eine Seite des elastischen Bandes auf der Außenseite des Velcroverschlusses und ziehen Sie das Band mit leichtem Zug über die Öffnung und befestigen es auf der gegenüberliegenden Seite.

Um einem Spitzfuß vorzubeugen, nehmen Sie die längeren Bänder und befestigen Sie diese auf den Markierungen unten an der Orthese. Ziehen Sie die Bänder mit leichter Kraft diagonal und über Kreuz über den Fußrücken und befestigen Sie diese an den Klettbandern.

Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an.

Legen Sie den beiliegenden Keil an die Außenseite des Fußes an. Drücken Sie diesen zur Mitte hin und kontrollieren Sie die Positionierung. Der Keil sollte fest an der NeaDekuPed Orthese sitzen. Kontrollieren Sie die Ferse des Patienten. Diese sollte frei liegen und keinen Kontakt zum Bett haben.

Gebrauchsanweisung

NeaDekuPed Lagerungsorthese



7. Material

70% Polyester, 25% Nylon, 5% Elasthan

8. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

Die Orthese kann bei 60° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Schließen Sie dazu alle Klettbänder. Zur Desinfektion der Orthese empfehlen wir das Desinfektionsmittel Ultrana CWC 2000, als Reinigungsmittel für die Waschmaschine das Desinfektionswaschmittel Ultra Fresh der Firma Ultrana oder vergleichbare Produkte.

9. Einsatzbedingungen, Lagerung und Entsorgung

Vor Verschmutzung und starkem Lichteinfluss schützen. Möglichst trocken und bei Raumtemperatur in der Originalverpackung aufbewahren. Die Orthese enthält keine umweltgefährdenden Stoffe und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

10. Bildzeichenerklärung

	Los-Nummer
REF	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung beachten!
CE	Konformität mit den Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
	Hersteller

11. **Hersteller:** neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm
Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289
www.neatec.de info@neatec.de



13. **Revisionsstand:** Stand Juni 2018