

# Gebrauchsanweisung

## Dorsolign LWS-Stützieder

### Wichtige Hinweise

Wählen Sie die richtige Größe aus und ersetzen Sie es bei größeren Gewichtsschwankungen durch eine passende Größe. Wir empfehlen, das Korsett nachts nicht zu tragen.

Entfernen Sie nicht das innere Etikett, dies enthält wichtige Informationen: Modell, Größe und Chargennummer.

Es wurden keine signifikanten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der korrekten Verwendung des Korsetts festgestellt. Bitte beachten Sie, dass alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Stützieder an den Händler oder Hersteller gemeldet werden sollten.

Tragen Sie unter dem Stützieder immer ein Unterhemd oder T-Shirt.

### Indikationen

Lumbalgie, Spondylose, Spondylolyse, Spondylolisthesis, Osteochondrose, Osteoporose, LWS-Insuffizienz mit Lumbago, nach Bandscheibenoperationen, Gefügestörung im lumbosacralen Übergang

### Hinweise für den Orthopädietechniker:

- ♦ Ermitteln Sie die richtige Größe durch Messen des Taillenumfangs.
- ♦ Wählen Sie zwischen den beiliegenden Stäben und Spiralen die notwendigen aus und schieben Sie diese in die vorgesehenen Besatzstreifen von oben ein.

### Anziehenanleitung



- ♦ Lösen Sie die vorderen Klettbinden und öffnen Sie den Reißverschluss.
- ♦ Legen Sie das LWS-Stützieder so um den Rumpf, dass der Reißverschluss vorne in der Mitte geschlossen werden kann. Das eingenähte Etikett sollte nach oben zeigen.
- ♦ Die Rückenvergütung sollte hierbei völlig entspannt sein. Das Mieder sollte immer auf der Unterwäsche getragen werden.



- ♦ Schließen Sie nun den Reißverschluss und achten Sie darauf, dass der untere Rand am Schambein aufliegt.
- ♦ Das Mieder soll so anliegen, dass die Lendenwirbelsäule gut eingeschlossen wird. Nehmen Sie nun die beiden Bänder mit den Klettverschlüssen jeweils in die rechte und linke Hand, führen den Daumen in die dafür vorgesehenen Schlaufen und ziehen Sie mit gleichmäßiger Kraft die beiden Bänder nach vorne und befestigen Sie diese auf der unteren Hälfte des Flauschbandes.



- ♦ Die Bänder sollten so weit nach vorne befestigt werden, dass eine deutliche Stabilisierung im Bereich der Lendenwirbelsäule spürbar ist, jedoch darf die Atmung nicht beeinträchtigt werden.
- ♦ Hinweis: Zur Aufrichtung der Wirbelsäule im Brustwirbelsäulen-bereich kann optional ein Geradehalter mit dem Dorsolign Stützieder kombiniert werden.

### Reinigung

Schließen Sie die Klettverschlüsse und waschen Sie das Stützieder bei 30°C Handwäsche mit mildem Feinwaschmittel. Nicht schleudern, an der Luft trocknen und **nicht im Trockner**. Nicht bügeln.

Medizinprodukt Klasse I – entspricht den Anforderungen der MDR 2017/745



Hersteller:



TLM srl., Via per Uboldo 48, I-21040 Gerenzano (VA)

Company with UNI EN ISO9001 and UNI EN ISO 13485 Quality Management System certified by Certiquality

Vertrieb:



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm [www.neatec.de](http://www.neatec.de)