



Gebrauchsanweisung Easy Walk® Peroneusorthese

Anlegen der Orthese in 9 einfachen Schritten



Die Kontur der Sohle der Orthese muss der inneren Form des Schuhs angepasst werden.

Es ist wichtig die richtige Größe der Orthese zu wählen. Nehmen Sie die Innensohle des Schuhs heraus und markieren Sie die Kontur der Innensohle auf der Orthese. Beachten Sie dass bei der Anpassung der Sohlenplatte der Verbindungssteg zur Wade nicht zu nahe an den medialen Fußknöchel kommt.



Schleifen oder Schneiden der Orthese

Schleifen Sie die Sohlenplatte bis zur Begrenzungslinie indem Sie ein Schleifpapier mit mittlerer Körnung (60) an der Schleifmaschine benutzen



...oder schneiden Sie die Sohlenplatte mit der Schere bis zur Begrenzungslinie. Wenn Sie die Breite der Sohlenplatte anpassen, schleifen oder schneiden Sie die Außenseite nicht mehr als nötig, so dass der innere Teil der Sohlenplatte nicht gegen den Fuß gepresst wird. Falls eine Korrektur der Sohlenplattenbreite erforderlich ist, schleifen oder -schneiden Sie die Sohlenplatte von beiden Seiten.




Fertigstellen der Kanten

Die Kanten der bearbeiteten Orthese sind scharf und können den Schuh zerschneiden oder zu Verletzungen führen. Deshalb müssen diese weich nachgeschliffen werden. Schleifen Sie die Kanten mit einem feinkörnigen wassergeprüften Schleifpapier. Um Staubbildung zu vermeiden, sollte das Schleifen unter Wasser gemacht werden.



Bekleben der Sohle

Verwenden Sie das beiliegende Velourmaterial. Ziehen Sie die Schutzhülle vom Velourmaterial ab und kleben Sie es auf die Sohle der Orthese. Schneiden Sie überstehendes Material ab oder biegen Sie es über die Kante und kleben es auf der Unterseite der Orthese fest.

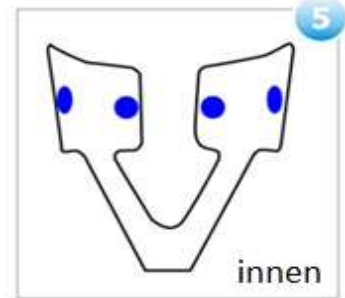

Anbringen der Polsterung

Das Set enthält 2 Pads, um die Innenseiten der Wadenspange abzupolstern.

Erhitzen Sie die Klebseite der Hakenpunkte mit einer Heißluftpistole und befestigen Sie diese an den Innenseiten der Wadenspange. Verwenden Sie 2 Hakenpunkte für jede Seite. Befestigen Sie die Polsterung an den Hakenpunkten.



Anbringen der Hakenpunkte für die Gurte

Befestigen Sie zwei Hakenpunkte auf den beiden Außenflächen der Wadenspanne.



Befestigen der Orthese am Bein

Ziehen Sie den Schuh zusammen mit der Orthese an. Legen Sie Wadenband um die Wade und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss.



Anbringen des Befestigungsgurtes

Befestigen Sie den Gurt von der lateralen Seite her an der Rückseite des Rahmens. Um das vordere Polster korrekt zu platzieren bringen Sie die beiden Hakenpunkte mit beidseits Haken an der gewünschten Stelle an. Befestigen Sie die Polsterung am Gurt in der richtigen Position. Messen Sie die proximale Länge des Gurtes und schneiden Sie ihn mit einer Schere ab. Befestigen Sie das Y-Hakenende am Ende des Gurtes.



Einlegen der Orthese in den Schuh


Die Höhe des Schuhabsatzes sollte zwischen 15-20 mm betragen, gemäß der Konstruktion der Orthese.

Nehmen Sie die Innensohle heraus, legen Sie die Orthese in den Schuh und die Innensohle darauf.

Wenn der Schuh keine Innensohle besitzt, dann legen Sie nur die Orthese in den Schuh. Die Orthese sollte fest sitzen und nicht im Schuh hin- und herrutschen.

Produktset:

- Carbonorthese
- selbstklebende Veloursohle
- Polsterungsteile (a und b)
- Gürtel (c)
- runde Klettverschlüsse/ Klebstoff (d)
- runde Klettverschlüsse/ Befestigungshaken (f)
- Y-Haken/Klettverschluss (e)

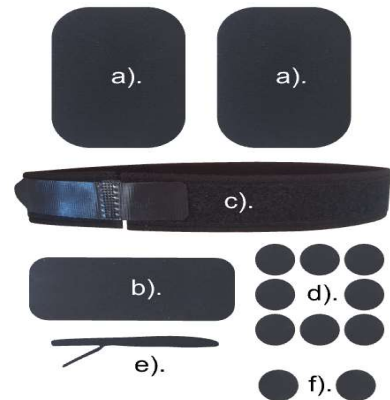

Wichtige Informationen

- Die Sohlenplatte oder andere Konstruktionsteile der Orthese dürfen nicht gebohrt oder perforiert werden, da Löcher die Faserstruktur des Materials beeinträchtigen können.
- Die Orthese kann nicht thermoplastisch verformt werden.
- Beim Schleifen oder Schneiden sollten die Augen geschützt und Nase und Mund bedeckt werden.
- Das Körpergewicht des Patienten darf 120 kg nicht überschreiten.

Hersteller:

ORTHO BALTIC

Taikos ave. 131a, LT-51124 Kaunas, Litauen

Telefon: +370 37 473970

Email: info@orthobaltic.lt

www.orthobaltic.eu

Vertrieb Deutschland:

neaTec GmbH, Neu-Ulm

www.neatec.de